


## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### AC017 modell

Légzésfigyelő készülék



## TARTALOMJEGYZÉK

 FIGYELMEZTETÉSEK .....	2
ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK .....	3
A babaegység beállítása .....	4
Az érzékelőlap elhelyezése .....	4
A készülék bekapcsolása .....	5
A készülék megismerése .....	5
Hibaelhárítás .....	7
Korlátozott jótállás .....	8
Műszaki adatok .....	8







## ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

AC017 típusú  
Légzésfigyelő készülék

### TARTOZÉKOK:

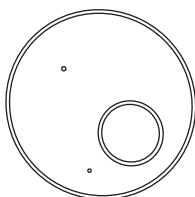

Babaegység

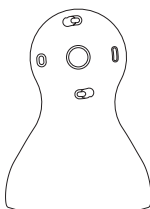

Asztali állvány  
(a babaegységhez)



Vezeték nélküli érzékelőlap  
\* Mindig úgy helyezze el, hogy az  
Angelcare® embléma felfele nézzen.\*



CR3032 elem  
(az érzékelőlaphoz)

### AMIRE SZÜKSÉGE LESZ (NINCS A CSOMAGBAN):



Mini csillagfejű csavarhúzó




2 db AAA alkáli elem

## 1. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

### BABAEGYSÉG:


Bekapcsolást jelző lámpa  
Alacsony töltöttségi szint lámpája

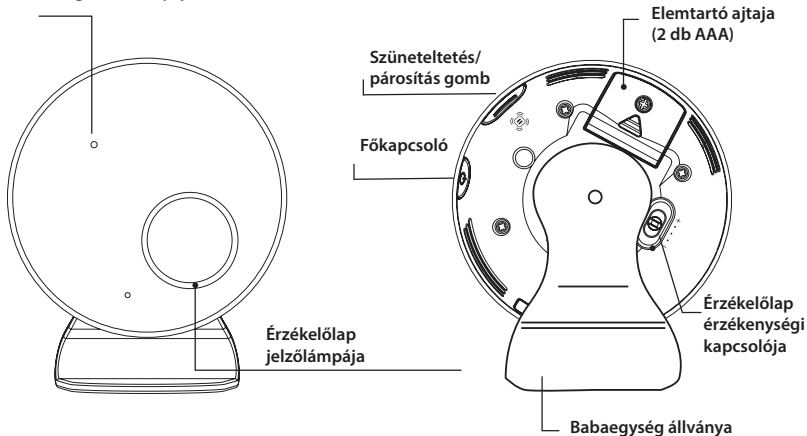

### 1.1 – TEGYE BE AZ ELEMEKET

Amikor először használja a babaegységet, be kell helyezni 2 db AAA alkáli elemet (nem tartozék).




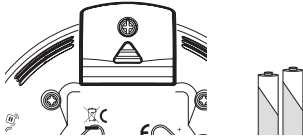

- 1) Távolítsa el az elemtartó fedelét csavarhúzóval, és helyezzen be 2 db AAA alkáli elemet.

## 1.2 – VÁLASSZON EGY HELYET A BABAEGYSÉGNEK


A babaegység az asztali állványra szerelhető.

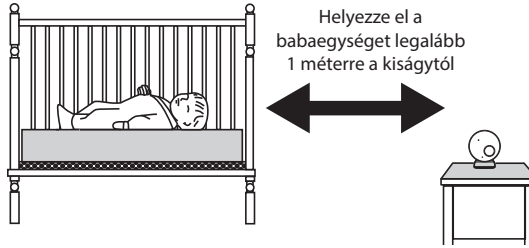

## 2. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐLAP ELHELYEZÉSE

### 2.1 – AZ ÉRZÉKELŐLAP ÁRAMELLÁTÁSA

Amikor először használja az érzékelőlapot, be kell helyeznie a mellékelt CR3032 elemet.

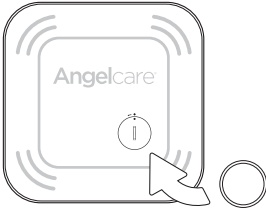

- 1) Távolítsa el az elemfedelet egy pénzérme segítségével. Fordítsa a nyíl irányába.
- 2) Helyezze be a mellékelt CR3032 elemet a rekeszbe. **Megjegyzés:** A + szimbólumnak felfele kell néznie.
- 3) Helyezze vissza az elemfedelet a két pont egy vonalba kerül. Az érzékelőlap most be van kapcsolva.


### 2.2 – HELYEZZE EL AZ ÉRZÉKELŐLAPOT AZ ÁGYRÁCSRA

#### FONTOS

Ha a kiságyban nincs szilárd, stabil felület az érzékelőlap számára, egy kemény lapot kell alá helyezni a rendszer megfelelő működése érdekében.

Ez a kemény lap legyen legalább 6 mm vastag, 33 cm széles és 33 cm hosszú, nagyobb, mint az érzékelőlap felülete

Az érzékelőlap memóriahabos matracok, üreges belsejű matracok és vízágyak kivételével bármilyen méretű és típusú matracal használható. A kemény lap állandó nyomást biztosít az érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha az a kiságy szélén tartózkodik.

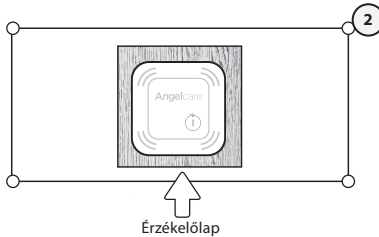

- 1) Távolítsa el a matracot a kiságyból.
- 2) Helyezze az érzékelőlapot az **Angelcare® emblémával felfelé** az ágyrács közepére. Ha alsó kemény lapra is szüksége van, akkor ennek a közepére kell helyezni.
- 3) Helyezze vissza a matracot.






## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az érzékelőlapot nem használhatják felnőttek és 24 hónaposnál idősebb gyermekek.

- A baba 24 hónapos kora után ne használja tovább az érzékelőlapot. Távolítsa el az érzékelőlapot a kiságyból, és őrizze meg későbbi használatra.
- **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:** Ellenőrizze, hogy az egység készen áll-e a használatra. Az útmutatóban talál információt arról, hogyan ellenőrizheti az üzembe helyezés helyességét.

### 3. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

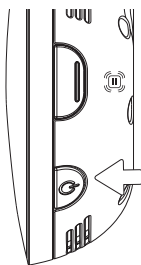

Nyomja le és tartsa lenyomva a babaegység főkapcsolóját 2 másodpercig, amíg a babaegység jelzőlámpája lassan zölden nem kezd villogni.


A babaegység hangot ad ki, és kéken villog, így megerősítve a párosítását az érzékelőlappal.

#### MEGJEGYZÉS:

Ha nem zölden, hanem pirosan villog, vagy téves riasztások fordultak elő, állítsa be az érzékenységi szintet (**4.3 lépés**).

### 4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK MEGISMERÉSE

#### 4.1 AZ ÉRZÉKELŐLAP TESZTELÉSE:

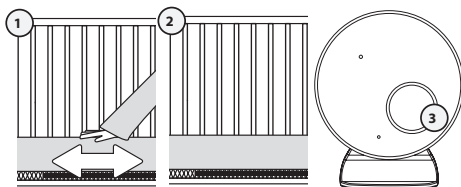

- 1) Finoman mozgassa a kezét a matracra.
- 2) Vegye el a kezét a matracról, és távolodjon el a kiságytól. 15 másodperc elteltével riasztás előtti hangot hall, és a lámpa pirosan villog.
- 3) 5 másodperc elteltével a babaegység hangos, folyamatos sípszóval és a lámpa folyamatos piros villogtatásával jelzi a mozgáskimaradás miatti riasztást.

#### MOZGÁSKIMARADÁS MIATTI RIASZTÁS

- Ha a babaegység 15 másodperc elteltével **NEM** érzékel mozgást, egyetlen riasztás előtti figyelmeztető hangot ad ki.
- Ha 5 másodperc elteltével **SEM** észlel mozgást, a babaegység hangos, folyamatos sípszót ad ki: ez a mozgáskimaradás miatti riasztás.

#### HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

- Amikor az érzékelőlap üzemel, ne érintkezzen a kiságygal.
- A kiságyat támassza falnak.
- Állítsa be az érzékelőlap érzékenységi szintjét.
- Kapcsolja ki a körforgót, a ventilátort, a hangos zenét és minden mást, amely rezgést okozhat.

#### A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA



Tegye a kezét a matracra.

**VAGY**



Nyomja meg a babaegység Szüneteltetés gombját.






#### FONTOS

- Első használat előtt próbálja ki a készüléket.
- Tesztelje rendszeresen a készülék megfelelő működését.
- Próbálja ki a készüléket minden alkalommal, amikor új helyre teszi az érzékelőlapot.

### 4.2 AZ ÉRZÉKELŐLAP SZÜNETELTETÉSE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA:

Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, amikor kiveszi a babát a kiságyból például etetéshez vagy dédelgetéshez.

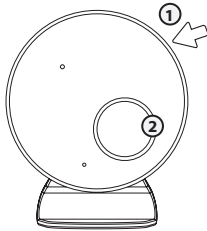

- 1) Nyomja meg a babaegység jobb felső sarkában a **Szüneteltetés** gombot.
- 2) Amikor az érzékelőlap működése szünetel, a lámpája fehéren villog. A babaegység egyetlen sípszót ad ki 20 másodpercenként, így jelezve, hogy a mozgásérzékelő funkció szünetel.
- 3) Az érzékelőlap visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **Szüneteltetés** gombot.

#### FONTOS


- Ha nem szünetelteti az érzékelőlap működését, és az a baba matracán nem érzel mozgást 20 másodpercig, megszólal a riasztás.
- Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el újra az érzékelőlapot.

### 4.3 – AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSA:

A baba, a kiságy és az üzembe helyezési körülményeknek megfelelően beállíthatja az érzékelőlap érzékenységet. Állítson be magas érzékenységet újszülött, illetve alacsonyabbat az idősebb és súlyban gyarapodó baba számára. Vastagabb matrac esetében szintén magasabb érzékenységre van szükség.

Húzza a babaegység érzékenységi szintjét állító gombot az alacsony, közepes és magas szintek közötti váltáshoz.

- Az optimális eredmények érdekében használja először az előre beállított érzékenységi szintet, és csak szükség esetén emelje azt.

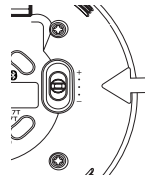

#### FONTOS

- Az érzékelőlapot nem használhatják felnőttek és 24 hónaposnál idősebb gyermekek.
- Miután befejezte az érzékelőlap használatát, kapcsolja ki a mozgásérzékelő funkciót, vegye ki az érzékelőlapot a kiságyból, és tegye el.


### 4.4 – ELEMEEK

#### A BABAEGYSÉG ALACSONY TÖLTÖTTSGI SZINTJÉNEK JELZÉSE:

Amikor ki kell cserélni a babaegységben az elemeket, az alacsony töltöttségi szint sárga jelzőlámpája villog, és 20 másodpercenként hangjelzés hallatszik.


#### ÉRZÉKELŐLAP ALACSONY TÖLTÖTTSGI SZINTJÉNEK JELZÉSE:

Amikor ki kell cserélni az érzékelőlapban az elemeket, az alacsony töltöttségi szint sárga jelzőlámpája villog, és 20 másodpercenként hangjelzés hallatszik.

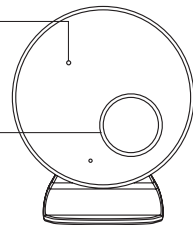



## HIBAELHÁRÍTÁS

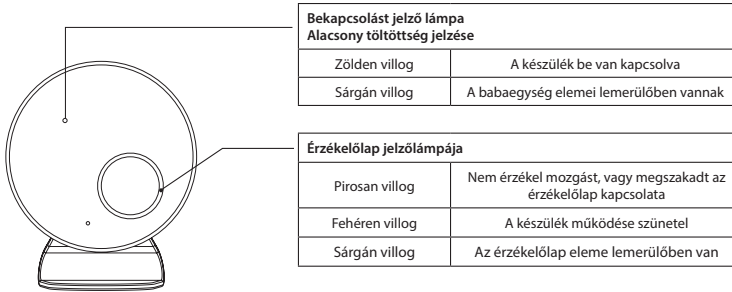

## TÉVES RIASZTÁSOK

- Kapcsolja ki a babaegységet.
- Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban.
- Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 33 x 33 cm méretű, 6 mm vastag kemény lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve. Lehetséges, hogy az érzékelőlap érzékenysége szintjét növelni kell, lásd a **4.3. lépést**.
- Csatlakoztassa újra az érzékelőlapot és a babaegységet úgy, hogy 2 másodpercig lenyomja és nyomva tartja a babaegység **Párosítás** gombját.

## NEM SZÓLAL MEG A RIASZTÁS

- Ne érintse meg a kiságyat, amikor a légzésfigyelő be van kapcsolva és távolodjon el a kiságytól legalább 3m-re.
- Helyezze a kiságyat egy szilárd támaszfal mellé, hogy az érzékelőlap ne érzékelje a kiságyon kívüli mozgásokat.
- Tegyen filcet a kiságy lábaira.
- Kapcsolja **ki** a körforgót, a ventilátort, a hangos zenét és minden mást, amely rezgést okozhat.
- Lehet, hogy csökkentenie kell az érzékenységet (lásd: **4.3. lépés**).

## AZ ÉRZÉKELŐLAP JELZŐLÁMPÁJA PIROSAN VILLOG

- Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban.
- Az érzékelőlapnak teljesen lapos és szilárd felületen kell feküdnie. Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 33 x 33 cm méretű, 6 mm vastag kemény lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve. Lehetséges, hogy az érzékelőlap érzékenysége szintjét módosítani kell, lásd a **4.3. lépést**.

## MEGSZAKAD A KAPCSOLAT (A BABAEGYSÉG KÉK LÁMPÁJA VILLOG, ÉS 20 MÁSODPERCENKÉNT HANGJELZÉST HALLAT)

- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a babaegység **Párosítás** gombját. A babaegység hangjelzést ad ki, és a lámpája kéken villog, így megerősítve a csatlakozást.

## NINCS ÁRAMELLÁTÁS

- Ellenőrizze és ha szükséges, cserélje az elemeket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.



## KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd a jótállási időszakokat országokként mutató táblázatot) alatt garatálja, hogy az Angelcare® készülék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a készüléknel a jótállási időszak alatt az utasításoknak megfelelő, rendeltetészerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének valamint az Önöz történő visszaküldésének költségeit az Angelcare® viseli.

A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetészerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® a termék használata kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminem felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semminem más jótállás nem érvényes.

A jótállás nem vonatkozik a nem Angelcare® márkájú termékekre és kiegészítőkre és azokra a problémákra, amelyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyeket nem az Angelcare® által mellékelte vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VELETLÉNSZERŰ VAGY KÖVETKÉZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ONRE NEM ÉRVÉNYESEK.

AZ ANGELCARE SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLTÁNAK KÖVETKÉZMÉNYEÉRT.

**FONTOSI** Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merül fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

A jótállással kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja:  
[international.angelcarebaby.com](http://international.angelcarebaby.com)

JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKOK ORSZÁGONKÉNT	
Észak-Amerika	1 év
Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország, Magyarország, Szlovénia	1 év
Más országok	2 év

## MŰSZAKI ADATOK

### Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): akár 8 méter.

### Áramellátás:

2 db AAA alkalielem a babaegységhez (nem tartozék)

1 db 3 V-os CR3032 elem a vezeték nélküli érzékelőhöz (tartozék)

**Vigyázat:** Az áramütés veszélyének enyhítése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Az elemek nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az érzékelőlap eleme felhasználó által cserélhető lítium- (nem lítiumon) elem, és NEM tölthető újra. Csak az Angelcare® által javasolt cserélelemeket használja. A cserélelemmel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az Angelcare® ügyfélszolgálatával a [www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com) címen, illetve a helyi forgalmazókkal. A cserélelem mellett megtalálja a használati útmutatójukat. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.

### Elemek:

- NE használjon együtt régi és új elemeket.
- NE használjon együtt szabványos alkáli- (szén-cink) és újratölthető (Ni-CD, NiMH stb.) elemeket.

**VIGYÁZAT:** A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEM HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT.

### Adatátvitel:

Az érzékelőlap és a babaegység közötti adatátvitel a 2,402-2,480 GHz-es frekvencián valósul meg.

Rádiófrekvenciás jel maximális erőssége: 4 dBm (2,5 mW)

Az Angelcare® Monitors Inc ezúton nyilatkozik, hogy ez a készülék teljesíti a 2014/53/ EU irányelv előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: [www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity](http://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity)

## VÉDJÉ A KÖRNYEZETET

Az áthúzott keresek kuka szimbólumok azt jelentik, hogy a helyi törvények és szabványok szerint a terméket és/vagy az elemét vagy akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladék-gyűjtőbe tenni. Amikor a termék, illetve az eleme vagy akkumulátora elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az elemek és akkumulátorok eltávolításához lásd a használati útmutatót.







## TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemhasználat miatt sérült meg. A garanciaszintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakította.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: lsd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztóiszerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnak aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói





szerződés megkötését.

**13.** A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

**14.** Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

**15.** Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben::

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC017 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

<b>TERMÉK TÍPUSA:</b> ANGELCARE® AC017 típusú készülék	<b>A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:</b>
<b>VÁSÁRLÁS DÁTUMA:</b>	<b>ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:</b>

## AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységét.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e,
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.

Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kikerkezéséig a leírtak szerint végezze.





Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjék meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazzon szívmasszázst! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...nem lélegzik	
...van pulzusa	
...eszméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjék meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.
...nem lélegzik	
...nincs pulzusa	

## MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő fejpozíció.



### 2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



### 3. Három levegő befúvás

Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilégzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek lélegzőmozgását figyelhessük. (c. kép)





Hanememelkedika baba mellkasa, akkor ez abból is következhethet, hogy valami elzárja a babalégcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)



## SZÍVMASSZÁZS

### 1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázszt végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázszt matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermekfelsőtestét szabaddá kell tenni.

### 2. Nyomási pont

Képzeld el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujj így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak



### 3. 15 szívmasszázs

A mellkascsontnyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel a legszükségvérkeringést indítja be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérrrel, figyelni kell arra, hogy a mellkascsont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzóódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázszt, hanem finoman úgy, hogy a szívnyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)

