


## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### AC117 modell

Légzésfigyelő készülék kétirányú babaőrzővel



## TARTALOMJEGYZÉK

 FIGYELMEZTETÉSEK .....	2
ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK .....	3
A szülői egység töltése (10 óra).....	4
Az érzékelőlap elhelyezése .....	5
A babaegység beállítása.....	6
A készülék bekapcsolása .....	7
A készülék tesztelése és megismerése .....	8
További funkciók bekapcsolása és kikapcsolása.....	14
Hibaelhárítás .....	15
Korlátozott jótállás.....	19
Műszaki adatok .....	19

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ORÍZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS UTASÍTÁSOKAT.

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, ILLETVE A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.

AZ ÉRZÉKELŐLAPOT NEM HASZNÁLHATJÁK FELNÖTTÉK ÉS 24 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB GYERMEKEK.

AZ ÉRZÉKELŐLAPOT NE HASZNÁLJA ANNAK ELLENŐRZÉSÉRE, HOGY A GYERMEK A KISÁGYBAN VAN-E.

## FIGYELMEZTETÉS

Az összeszerelést felnőtt végezze el.

Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.

Az Angelcare® büszke minden termékére.

Amennyiben ön elégedetlen, vagy kérdései merültek fel:

**Egyesült Államok és Kanada:** Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: angelcare@cdecinc.ca

**Más országok:** Vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

## FIGYELMEZTETÉSEK



### FIGYELMEZTETÉS - Fulladásveszély – Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.

- **TARTSA TÁVOL** a babaegységet és az adapterkábeleket a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban).
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja.
- **A termék NEM játék. SOHA** ne engedjen gyermekeket játszani vele.

1. A TERMÉK NEM HELYTESÍTSI A FELELŐSSÉGTELJES FELNÖTT FIGYELMÉT. A termék célja, hogy segítse babája felügyeletét. Ettől függetlenül azonban a baba biztonsága érdekében a készülék használata mellett is megfelelő figyelmet kell fordítania a babájára. A koraszülött vagy veszélyeztetett gyermekek felügyeletét mindig egy egészségügyi szakértő által előírt módon végezze. A készülék NEM orvosi eszköz, és NEM alkalmas a bölcsőhalál (SIDS) megelőzésére.

2. NE fogja meg a konnektorhoz csatlakoztatott adapter csupasz végét.

3. MINDIG ügyeljen rá, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy egymás hatásugarán belül helyezkedjenek el. Első használat előtt próbálja ki a készüléket, végezzen rendszeres ellenőrzéseket, és mindig tesztelje működését, ha megváltoztatja a babaegység elhelyezkedését.

4. MINDIG azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.

5. NE használja a készüléket víz közelében (pl. fürdőkád, mosogató stb.).



6. Tartsa TÁVOL a készüléket hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.).

7. MINDIG sík felületen, függőlegesen helyezze el a babaegységet és a szülői egységet, és ügyeljen a megfelelő szellőzésre. NE helyezze kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, mely akadályozhatja a levegő szabad áramlását.

8. A babaőrző nyilvános frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egységet érhetik a környéken található más babaőrzőktől származó jelek vagy interferencia. A babor jelét akár szomszédos lakásokban is foghatják. Magánélete védelme érdekében mindig kapcsolja ki a két egységet, ha nem használja őket.

9. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Az összeszerelést felnőtt végezze el. Járjon el óvatosan a termék kicsomagolásánál és összeszerelésénél, és tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.

10. A készülék 10 °C és 40 °C közötti szobahőmérsékleten használható.

## ELEMEKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

11. A szülői egység elemei cserélhető nikkél-metál-hibrid elemek. A vezeték nélküli érzékelőlap eleme cserélhető lítium gombelem. Csak az Angelcare által javasolt cserélelemet használja. A nem megfelelő elem használata, illetve a nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az elem megfelelő behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót. NE okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozókon. Az elem töltésére csak az Angelcare által biztosított adaptert használja. Ha a szülői egységet hosszabb ideig



### 12. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

12.1 Tartsa be a figyelmeztetéseket – A terméken és a használati útmutatóban található minden figyelmeztetést be kell tartani.

12.2 Kövesse az utasításokat – Minden, működtetésre és használatra vonatkozó utasítást követni kell.

12.3 Víz és nedvesség – NE tegye ki viznek a készüléket. Ne helyezze például fürdőkád, lavór, mosogató, mosóteknő közelébe, vagy bármilyen nedves környezetbe, például úszómedence mellé. Ügyeljen arra is, hogy az egységekre NE ESSENEN tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék a nyílásokon keresztül az egységekbe vagy az érzékelőlapba.

12.4 Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A készülék semmilyen alkatrészét NE merítse vízbe. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.

12.5 Szellőzés – NE zárja le a szellőzőnyílásokat. Ügyeljen rá, hogy a termék használat közben megfelelően szellőzzön. NE takarja le a babaegységet vagy a szülői egységet semmilyen tárggyal (pl. takaró). NE tegye be a készüléket fókba vagy bármilyen olyan helyre, amely tömpti az általa kiadott hangot, vagy akadályozza a levegő szabad áramlását.

12.6 Hőforrások – NE helyezze hőforrás, pl. radiátor, hűsugárzó, sütő, televízió vagy egyéb, hőt kibocsátó berendezések (pl. erősítő) közelébe. A hő károsíthatja a készülékházat vagy az elektromos alkatrészeket.

12.7 Kábelek védelme – Ügyeljen arra, hogy az érzékelőlap és az adapter kábelére ne lépjenek rá, és az ne szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá, fölé vagy közé. A tápkábeleket úgy kell vezetni, hogy minél kisebb legyen a lehetőségük arra, hogy rájuk lépnek, vagy hogy bútorok vagy más tárgyak alá/fölé/közé szorulnak. Különböző figyelmet kell fordítani a vezetékekre és dugulákra, elosztókra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilépnek a termékből. A berendezést helyezze egy könnyen elérhető konnektor közelébe. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fal ijaizathoz csatlakoztassa. A táphálózatról való leválasztáshoz húzza ki az adaptert.

12.8 Kiegészítők – Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.

NE helyezze a terméket instabil kézikocsira, állványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva gyermekeknek vagy felnőtteknek, és komolyan károsíthatja magát az eszközt is. KIZÁRÓLAG a gyártó által javasolt vagy a termékkel együtt árusított kiegészítő, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.

12.9 Húzza ki a konnektorból a készüléket villámlással járó viharban, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.

12.10 Szervizelés – NE kísérelje meg saját kezűleg megjavítani a terméket, mivel a fedél felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az elemtartó ajtját) veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek teheti ki önt.

12.11 Cseréleltartozékok – Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy az eredeti alkatrészzel minden szempontból megegyező cseréleltartozékot használjon. Nem hivatalos cseréleltartozék használata tüzet, áramütést és egyéb veszélyt okozhat.





**12.12** Használat – A jelen készülék pusztán a szülők munkájának támogatására szolgál. NEM helyettesíti a felőles és megfelelő felnőtt felügyeletet, és nem is szabad ennek kiváltására használni. A készüléket KIZÁRÓLAG a jelen használati útmutatóban megadott javaslatok szerint használja.

**12.13** Áramforrások – Kizárólag az adapter adattábláján olvasható áramforrásról működtesse a terméket. Érdeklődjön a kereskedőjénél vagy a helyi áramszolgáltatónál, ha nem biztos benne, hogy otthonában milyen áramforrás található.

**12.14** Túlterhelés – NE terhelje túl a falijalzatokat, hosszabbítókat kábeleket vagy egybeépített elosztókat. Ez tűz vagy áramütés veszélyével jár.

**12.15** Tárgyak és folyadékok bekerülése – SOHA ne nyomjon be tárgyat a termék belsejébe a burkolat résin keresztül, mivel ezek veszélyes feszültségű pontokat érhetnek, vagy kiülhetnek olyan alkatrészeket, melyek tüzet vagy áramütést okozhatnak. SOHA ne öntsön folyadékot a termékre.

**12.16** Antenna – Az adóegységhez használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es biztonsági távolság álljon fenn közte és a környezetében lévő emberek között. Az antennát nem szabad bővíteni, és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni.

**12.17** Elektromos vezeték – A szabad téren elhelyezett antennarendszert TILOS felső elektromos vezeték vagy más elektromos lámpa- vagy áramkör közelébe vagy olyan helyre tenni, ahol rászethelyezhető vezetékre vagy áramkörökre. Ezek érintése halálos lehet.

**12.18** Rezgés – A légzésfigyelő használata során NE használjon babaobbit, körforgót vagy bármely más olyan kiegészítőt, amely rezgést okozhat. Rezgést egy ventilátor, mosógép, hangos zene stb. is okozhat. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését, így az nem riad, ha a gyermek kivül tartósan más mozgást is érzékel. A légzésfigyelő használata során minden rezgésforrást szüntessen meg.

**12.19** A téves riasztásnak több oka lehet. A leggyakoribb ok, hogy a babaegységet nem kapcsolják ki, miután a gyermeket kivették a kiságyból. További ok lehet, hogy az érzékelőlapot nem megfelelően helyezte az ágymatrac alá. Gondoskodjon arról, hogy az érzékelőlap sík, stabil felületen legyen, és az Angelcare® embléma felfelé nézzen. Előfordulhat, hogy módosítania kell az érzékenységi szintet. Tekintse át az **5.2-es lépést**. Mindig azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.

**12.20** Érzékelőlap – Az érzékelőlap minden nem mozgó kiságyban használható. Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 33 x 33 cm méretű, 6 mm vastag kemény lapot, és ezen használja az érzékelőlapot. Az Angelcare® légzésfigyelőt kizárólag modulárisan alvókörnyezetben, például kiságyban használja, ahol az érzékelőlap teljesen

sík, stabil felületen helyezhető el. Az érzékelőlap műanyagból készült, és nem engedi át a levegőt. Ezért előfordulhat, hogy az érzékelőlap környéke penészedni kezd a matrac alatt. A penészedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen forgassa meg a matracot.

**13. ELEMEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

**13.1** KIZÁRÓLAG a használati útmutatóban megadott típusú és méretű elemeket használjon. Nem megfelelő típusú elemek használata robbanást okozhat.

**13.2** Első használat előtt töltsen 10 órán át a szülői egységet tölthető elemet. Erre az időszakra kapcsolja ki a készüléket. KIZÁRÓLAG a készülékhez mellékelt adaptert használja.

**13.3** NE használja ezt az adaptert más berendezésekkel.

**13.4** Kizárólag kikapcsolt állapotban húzza ki az adaptert a babaegységől.

**13.5** NE dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak. Ellenőrizze, hogy a helyileg hatályos előírások nem tartalmaznak-e esetleg különleges ártalmatlanítási utasításokat.

**13.6** Ügyeljen rá, hogy az elemek kezelésekor ne okozzon bennük rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs). Kerülje az elemek túltöltését, rövidzárlat okozását, fordított töltést, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a felületi hőmérséklet.

**13.7** NE próbálja meg melegítéssel megújítani a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket. Ennek következtében hirtelen elektrolit folyhat ki az elemekből, ami égési sérüléseket vagy irritációt okozhat a szemben vagy a bőrön.

**13.8** Szükség esetén az elemeket ugyanolyan vagy velük (feszültségben és méretben) megegyező elemekre kell cserélni.

**13.9** Kerülje az elemek fordított polaritását behelyezéséskor. Az elemek fordított behelyezése esetén töltés jöhet létre, ami szivárgást vagy robbanást okozhat.

**13.10** Ha a szülői egységet 30 napnál hosszabb ideig tervezi tárolni, vegye ki belőle az elemeket, mivel szivároghatnak, ami károsíthatja a berendezést.


**13.11** A lemerült elemeket a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb valószínűséggel folynak ki a termék belsejében. A szivárgó vagy eresző elemeket védőkesztyű használata mellett azonnal le kell cserélni.

**13.12** NE tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket magas hőmérsékletű helyen.


# ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

## TARTOZÉKOK:

**AC117 modell**  
Légzésfigyelő készülék kétirányú  
babaőrzővel

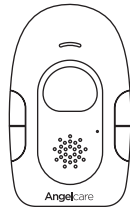


Szülői egység

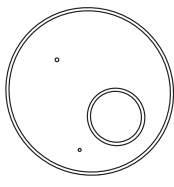


Babaegység



Asztali állvány  
(a babaegységhez)

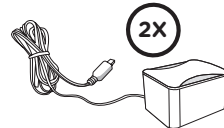

2 db hálózati adapter  
(a szülői egységhez és a babaegységhez)

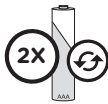

2 db újratölthető AAA-elem  
(a szülői egységhez)




Vezeték nélküli mozgásérzékelő lap  
\* Mindig úgy helyezze el, hogy az Angelcare  
embléma felfele nézzen.\*



CR3032 elem  
(az érzékelőlaphoz)




## 1. LÉPÉS - A SZÜLŐI EGYSÉG FELTÖLTÉSE (10 ÓRA)

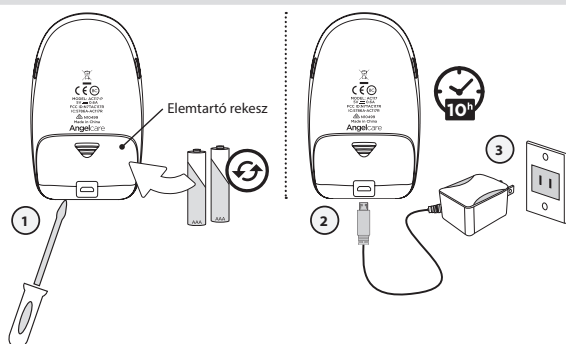

- 1) Távolítsa el a hátlapon lévő elemtartó fedelét. Helyezze be a mellékelt újratölthető elemeket a rekeszbe.
- 2) Csatlakoztassa az USB-kábelt a szülői egységhez, és csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorhoz.
- 3) Az első használata előtt töltsen **10 órán át folyamatosan az egységet.**

### SZÜLŐI EGYSÉG:

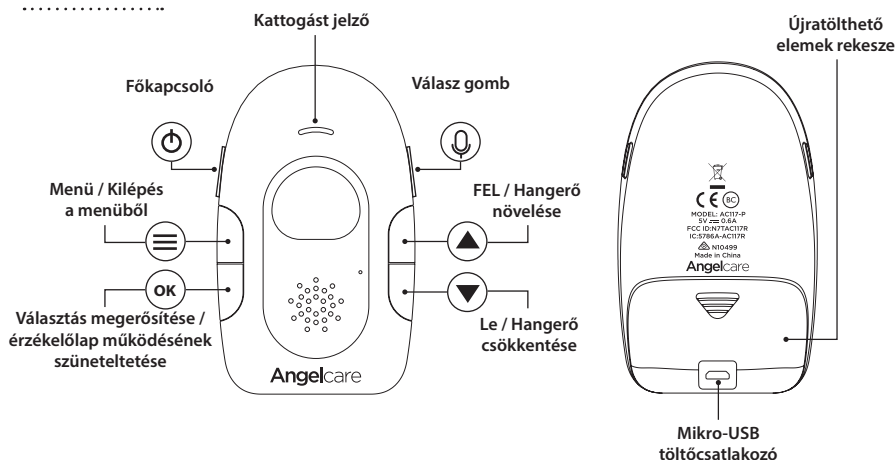

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS** - Fulladás-veszély – Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.



- **TARTSA TÁVOL** a babaegységet és az adapterkábeleket a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságban).
- **SOHA** ne használjon hosszabbítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja.
- **A termék NEM játék. SOHA** ne engedjen gyermeket játszani vele.



## 2. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐLAP ELHELYEZÉSE

### 2.1 - AZ ÉRZÉKELŐLAP ÁRAMELLÁTÁSA

Amikor először használja az érzékelőlapot, be kell helyeznie a mellékelt CR3032 elemet.

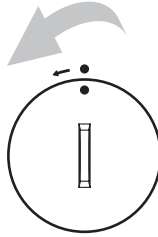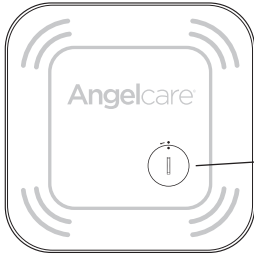

- 1) Távolítsa el az elemfedelet egy pénzérme segítségével. Fordítsa a nyíl irányába.
- 2) Helyezze be a mellékelt CR3032 elemet a rekeszbe.  
**Megjegyzés:** A + szimbólumnak felfele kell néznie.
- 3) Helyezze vissza az elemfedelet (a két pont egyvonalba kerüljön). Az érzékelőlap most be van kapcsolva.

### 2.2 - HELYEZZE EL AZ ÉRZÉKELŐLAPOT AZ ÁGYRÁCSRA

#### FONTOS


Ha a kiságyban nincs szilárd, stabil felület az érzékelőlap számára, egy kemény lapot kell ez alá helyezni a rendszer megfelelő működése érdekében.

Ez a kemény lap legyen legalább 6 mm vastag, 33 cm széles 33 cm hosszú, nagyobb, mint az érzékelőlap felülete.

Az érzékelőlap memóriahabos matracok, üreges belsejű matracok és vízágyak kivételével bármilyen méretű és típusú matracal használható. A kemény lap állandó nyomást biztosít az érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha az a kiságy szélén tartózkodik.



Falap

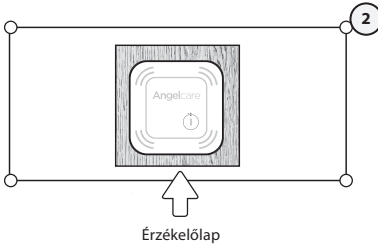

Érzékelőlap

- 1) Távolítsa el a matracot a kiságyból.
- 2) Helyezze az érzékelőlapot az **Angelcare® emblémával felfelé** az ágyrács közepére. Ha alsó kemény lapra is szüksége van, akkor ennek a közepére kell helyezni.
- 3) Helyezze vissza a matracot.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Az érzékelőlapot nem használhatják felnőttek és 24 hónaposnál idősebb gyermekek.
- A baba 24 hónapos kora után ne használja tovább az érzékelőlapot. Kapcsolja ki a mozgásérzékelő funkciót, majd vegye ki az érzékelőlapot a kiságyból, és őrizze meg későbbi használatra.
- **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:** Ellenőrizze, hogy az egység készen áll-e a használatra. Az útmutatóban talál információt arról, hogyan ellenőrizheti az üzembe helyezés helyességét.






### 3. LÉPÉS - A BABAEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

#### 3.1 – VÁLASSZON EGY HELYET A BABAEGYSÉGNEK

##### FONTOS

A kiságyat fal mellett, a légáramlatoktól távol helyezze el. Helyezze a babaegységet sík, stabil felületre úgy, hogy a kiságy felé nézzen, és attól legalább **1 méterre** legyen. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz csatlakoztassa.

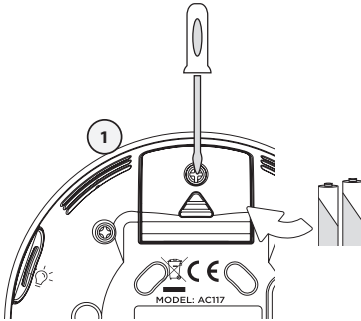


- 1) Távolítsa el az elemfedelelet, és helyezzen be 2 db AAA alkáli elemet (nem tartozék).

##### Megjegyzés:

Az elemek tartalék áramforrásként áramszünet esetén biztosítják az áramellátást.


2

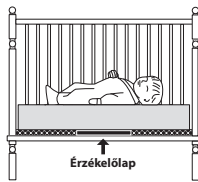

**A TÁVOLSÁG  
LEGYEN  
LEGALÁBB  
1 MÉTER**



- 2) Helyezze a babaegységet sík, stabil felületre úgy, hogy a kiságy felé nézzen, és attól legalább **1 méterre** legyen.
- 3) Ellenőrizze, hogy az érzékelőlap nem mozdult-e el.
- 4) Helyezze vissza a matracot a kiságyba.

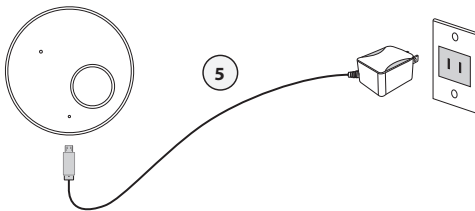



- 5) Csatlakoztassa az adaptert a babaegységhez, és dugja be a konnektorba.

**Megjegyzés:** Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a babaegységet, az automatikusan kalibrálja a belső hőmérőjét a pontosságának biztosítása érdekében. Ez kb. 30 másodpercet vesz igénybe. A színváltási hőmérsékletjelzés alapértelmezetten ki van kapcsolva. Ezt a szülői egység beállításai között kapcsolhatja vissza.



**BABAEGYSÉG:**


Bekapcsolást jelző lámpa  
Alacsony töltöttség jelzése

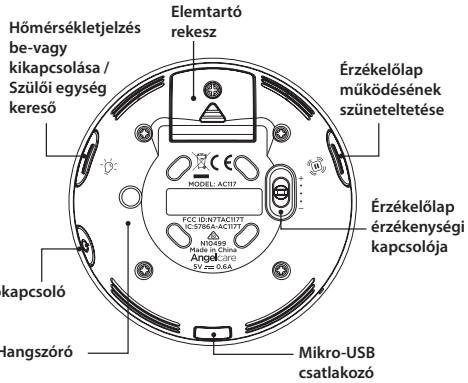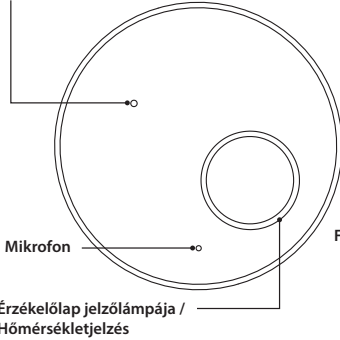**4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA****KÉSZEN ÁLL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA**


Az Angelcare® készülék gyári és a felhasználó által beállított beállításokkal egyaránt használható.

**ALAPÉRTTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK**

	<b>Érzékelési mód:</b>	<b>bekapcsolva</b>
	<b>Mozgás:</b>	<b>bekapcsolva</b>
	<b>Hang:</b>	<b>bekapcsolva</b>
	<b>Hangátvitel (VOX):</b>	<b>bekapcsolva</b>
	<b>Kattogó funkció:</b>	<b>kikapcsolva</b>
	<b>VOX érzékenysége:</b>	<b>kikapcsolva</b>
	<b>Hőmérséklet mértékegysége:</b>	<b>Celsius</b>
	<b>Hőmérsékleti riasztás:</b>	<b>kikapcsolva</b>
	<b>Hőmérsékleti riasztás beállítása:</b>	<b>Magas: 30 °C</b> <b>Alacsony: 19 °C</b>

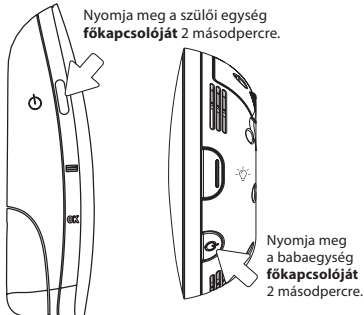**A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA****MEGJEGYZÉS:**

A szülői egység képernyőjén villogni kezd a „Hatótávolságon kívül” ikon, majd a helyiség hőmérsékletét és funkciókat jelző ikonok is. A kapcsolódási folyamat 30 másodpercen belül befejeződik. Ha ez nem ér véget 30 másodpercen belül, ki kell kapcsolni az egységeket, majd meg kell ismételni a folyamatot.

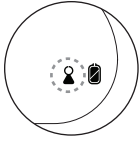

Amikor a szülői egység be van kapcsolva, míg a babaegység nincs, vagy a két egység között megszakad a kapcsolat:

- Villog a **Hatótávolságon kívül** ikon a szülői egységen.
- A szülői egység 15 másodpercenként 3-at sípol.

**FONTOS IKONOK**

**Hőmérséklet jelzése**

**Hőmérsékleti riasztások ikonja:**

- Túl meleg
- Túl hideg

**Érzékelési mód ikonjai:** azt jelzi, hogy be van kapcsolva a mozgásérzékelő funkció

- Csak mozgás →
- Csak hang →
- Hang, mozgás és kattogás →
- Mozgás és hang →
- Mozgás és kattogás →

**VOX ikon:** jelzi, ha a babaegység VOX módban van

- Hangra aktiválódó átvitel (VOX bekapcsolva)
- Folyamatos hangátvitel (VOX kikapcsolva)

**Kapcsolat ikonja:** a szülői egység és a babaegység közötti kapcsolat minőségét jelzi

- ((( ))) → Jó kapcsolat
- (( )) → Közepes erősségű kapcsolat
- ( ) → Gyenge kapcsolat
- ☹ → Hatótávolságon kívül

**Töltöttségi szint ikonja:** a szülői egység elemének töltöttségét jelzi

- ☺ → Feltöltve
- ☺ → 1/2
- ☹ → Lemerült
- ☺ → Töltés alatt

**Hangerősség szintjének jelzése**

## 5. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE ÉS MEGISMERÉSE

Az Angelcare® készülék gyári és a felhasználó által beállított beállításokkal egyaránt használható.



A főmenüben végzett módosítások csak akkor lépnek érvénybe, ha a **KILÉPÉS** gomb megnyomásával megerősíti őket.

### FONTOS

Menü módban a rendszer ideiglenesen kikapcsolja a szülő- és babaegység közötti hangátvitelt.

### 5.1 – A MENÜ MEGNYITÁSA ÉS A BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A MENÜ a szülői egység MENÜ gombjának lenyomásával és nyomva tartásával nyitható meg. A menüpontok egymás után választhatók ki. Amikor röviden megnyomja az **OK** gombot, a következő lehetőségre ugrik. Miután kiválasztotta a kívánt lehetőséget, nyomja meg a **KILÉPÉS A MENÜBŐL** gombot, különben a módosítások elvesznek. A menüpontok sorrendje a következő:

MENÜ GOMB LENYOMÁSA ÉS NYOMVA TARTÁSA: Mozgás	5.2-ES LÉPÉS
EGYSZERI LENYOMÁS: MOZGÁS ÉS KATTOGÁS	5.2-ES LÉPÉS
KÉTSZERI LENYOMÁS: HANG	5.5-ES LÉPÉS
HÁROMSZORI LENYOMÁS: VOX	5.6-OS LÉPÉS
NÉGYSZERI LENYOMÁS: HŐMÉRSÉKLET	5.7-ES LÉPÉS








## 5.2 – AZ ÉRZÉKELŐLAP KI- VAGY BEKAPCSOLÁSA

### A LÉGZÉSFIGYELŐ BEÁLLÍTÁSA

Lehetővé teszi a baba mozgásának érzékelését.

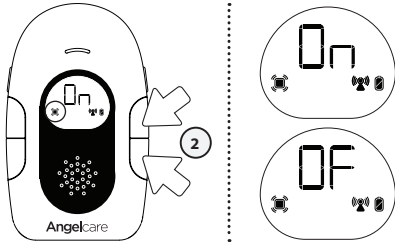


- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, amíg a **Mozgásérzékelés** ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyilakkal kapcsolja be vagy ki a mozgásérzékelést.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

### A KATTOGÁS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Ez a funkció kattogó hangot ad ki, amikor a baba megmozdul

#### FONTOS


A kattogó funkció bekapcsolásakor a mozgásérzékelésnek bekapcsolt állapotban kell lennie.

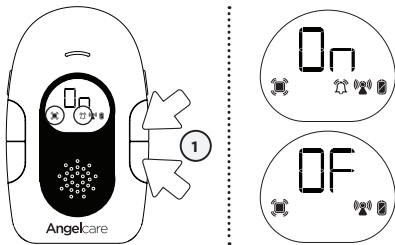

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a Kattogás ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyilakkal kapcsolja be vagy ki a Kattogás funkciót.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

### AZ ÉRZÉKELŐLAP TESZTELÉSE

BE KELL KAPCSOLNI A MOZGÁSÉRZÉKELÉS FUNKCIÓT:

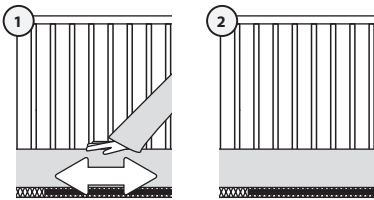


- 1) Finoman mozgassa a kezét a matracraon.  
**MEGJEGYZÉS:**  
A szülői egység kattog (amikor be van kapcsolva), és 5 másodpercenként villog.
- 2) Vegye el a kezét a matracról és távolodjon el a kiságytól, 15 másodperc elteltével riasztás előtti kattogó hangot hall, majd 5 másodperc elteltével bekapcsol a mozgáskimaradás miatti riasztás.
- 3) Ismétlje meg a mozgulatsort a matrac mind a négy sarkában.





### MOZGÁSKIMARADÁS MIATTI RIASZTÁS


- Ha a babaegység 15 másodperc elteltével NEM érzékel mozgást, egyetlen riasztás előtti figyelmeztető hangot ad ki.
- Ha további 5 másodperc elteltével SEM érzékel mozgást a matrac felületén, a szülői egység és a babaegység hangszórói folyamatos sípólást adnak ki: ez a mozgáskimaradás miatti riasztás.
- A babaegység pirosan villog.
- Az érzékelőlap ikonja és a hangerő ikonja villog a szülői egységen.

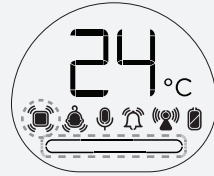

### HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG


- Amikor az érzékelőlap üzemel, ne érintkezzen a kiságygal.
- A kiságyat támassza falnak.
- Állítsa be az érzékelőlap érzékenységi szintjét.
- Kapcsolja ki a körforgót, a ventilátort, a hangos zenét és minden mást, ami rezgést okozhat.

### A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA

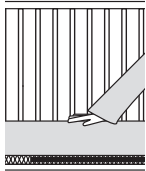


Tegye a kezét a matracra.

VAGY

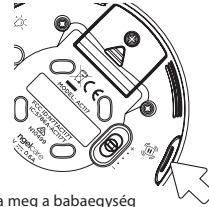

Nyomja meg a babaegység **SZÜNETELTETÉS** gombját.


VAGY

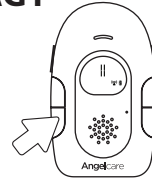

Nyomjon meg bármilyen gombot a szülői egység.

### 5.3 – AZ ÉRZÉKELŐLAP SZÜNETELTETÉSE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA

Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, amikor kiveszi a babát a kiságyból például etetéshez vagy dédelgetéshez.

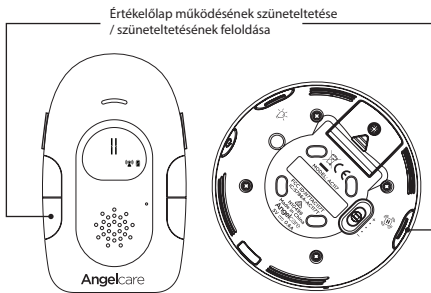

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülői egységen az **Érzékelőlap működésének szüneteltetése (OK)** gombot legalább 2 másodpercig.

**VAGY**

A babaegységen nyomja meg a **Szüneteltetés** gombot.

- 2) Az érzékelőlap újbóli bekapcsolásához a szülőegységen nyomja meg az **Érzékelőlap működésének szüneteltetése (OK)** gombot.

**VAGY**

A babaegységen nyomja meg a **Szüneteltetés** gombot.

### FONTOS

- Ha nem szünetelteti az érzékelőlap működését, és az a baba matracán nem érzékel mozgást 20 másodpercig, megszólal a riasztás.
- Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el újra az érzékelőlapot.






## 5.4 – AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A baba, a kiságy és az üzembe helyezési körülményeknek megfelelően beállíthatja az érzékelőlap érzékenységet. Állítson be magas érzékenységet újszülött, illetve alacsonyabbat az idősebb és súlyban gyarapodó baba számára. Vastagabb matrac esetében szintén magasabb érzékenységre van szükség. Húzza a babaegység érzékenységi szintjét állító gombot az alacsony, közepes és magas szintek közötti váltáshoz.

Az optimális eredmények érdekében használja először a közepes érzékenységi szintet, és csak szükség esetén emelje vagy csökkentse azt.

### MEGJEGYZÉS:

Ha téves riasztásokat kap, állítsa magasabbra az érzékenységi szintet.


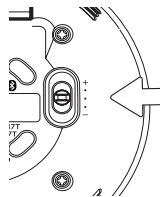


### FONTOS

- Az érzékelőlapot nem használhatják felnőttek és 24 hónaposnál idősebb gyermekek.
- Miután befejezte az érzékelőlap használatát, kapcsolja ki a mozgásérzékelő funkciót, vegye ki az érzékelőlapot a kiságyból, és tegye el.

## 5.5 – HANG

### HANG AKTIVÁLÁSÁHOZ:

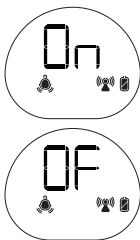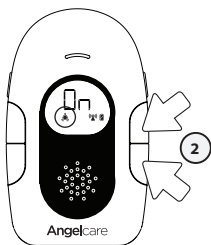

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **Hangtovábbítás** ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyilakkal kapcsolja be vagy ki a funkciót.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

### HANG TESZTELÉSÉHEZ:


Kérjen meg valakit, hogy beszéljen bele a babaegységbe, vagy helyezze az egységet bekapcsolt rádió mellé a hangátvitel ellenőrzéséhez.

### FONTOS

A visszacsatolás (füttyülő hang) elkerülése érdekében tartsa egymástól legalább 3 méteres távolságban az egységeket.


### HA NINCS HANG:

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva mindkét egység.
- Ellenőrizze, hogy az egységek működő konnektorba vannak-e bedugva.
- Ellenőrizze az egységekbe helyezett elemeket (cserélje vagy töltsse fel őket, ha szükséges).
- Hozza közelebb a szülői egységet a babaegységhez.

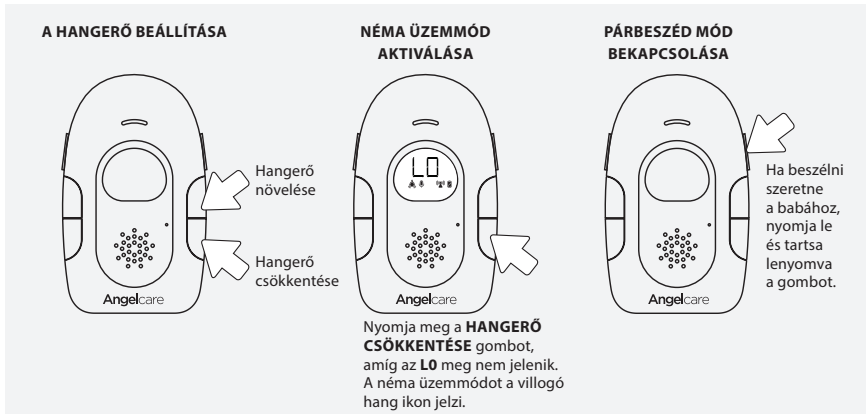

## 5.6 – HANGRA AKTIVÁLÁS (VOX BEKAPCSOLVA) VAGY FOLYAMATOS HANG (VOX KIKAPCSOLVA) MÓD



Segítségével beállíthatja, hogy hogyan adjon hangot a babaőr: **VOX** (hang általi aktiválás, amely a kiválasztott érzékenységi szint alapján kezdi el továbbítani a hangot) vagy **Folyamatos** (folyamatos hangfigyelés, amely állandóan továbbítja a hangot).

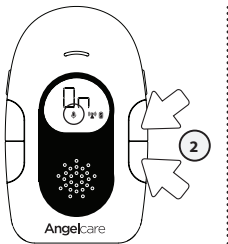

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **VOX** ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyilakkal kapcsolja be vagy ki a **VOX** funkciót.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

### A HANGÉRZÉKENYSÉG (VOX) BEÁLLÍTÁSÁHOZ:

A mikrofon érzékenysége állítható. Tehát a rendszer csak akkor továbbít hangot, ha az eléri az ön által meghatározott szintet.

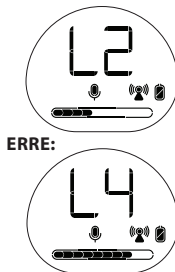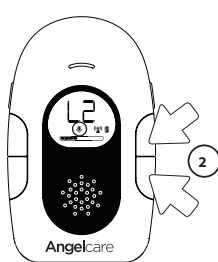


- 1) Amikor a Hangátvitel be van kapcsolva (VOX bekapcsolva), nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **VOX bekapcsolva** ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** és **LE** nyilgombokkal válassza ki a kívánt mikrofonérzékenységi szintet.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.






## 5.7 – HŐMÉRSÉKLET

### A HŐMÉRSÉKLET MEGADÁSÁHOZ CELSIUS VAGY FAHRENHEIT FOKBAN:

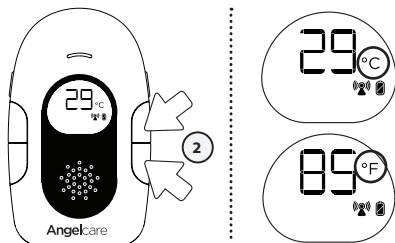

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a °C / °F ikon villogni nem kezd.
- 2) A **FEL** és **LE** nyílombokkal válassza ki a hőmérsékletet Celsius- vagy Fahrenheit-fokban.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

### A HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁHOZ

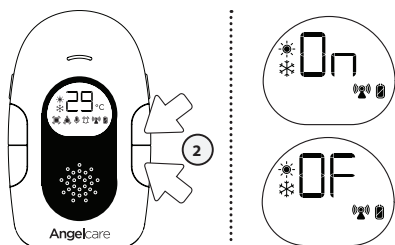


- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot, amíg a **Hőmérsékletjelzés** ❄️ ikon **villogni nem kezd**.
- 2) A **FEL** vagy **LE** nyílombokkal kapcsolja be vagy ki a hőmérsékletriasztást.
- 3) Nyomja meg az **OK** gombot a választása megerősítéséhez, és állítsa be a hőmérséklet tartományát az alábbiaknak megfelelően.


### A HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY BEÁLLÍTÁSÁHOZ:

#### MEGJEGYZÉS:

A hőmérsékleti tartomány beállításához be kell kapcsolni a hőmérsékleti riasztást.

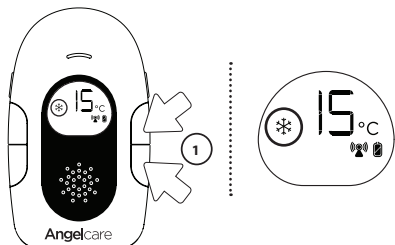

- 1) Villogni kezd az **Alacsony hőmérséklet** ❄️ ikon. A **FEL** vagy **LE** nyílombokkal állítsa be az **ALACSONY** hőmérséklet riasztását (5–19 °C között).
- 2) Nyomja meg az **OK** gombot a választása megerősítéséhez, és állítsa be a magas hőmérséklet riasztását.

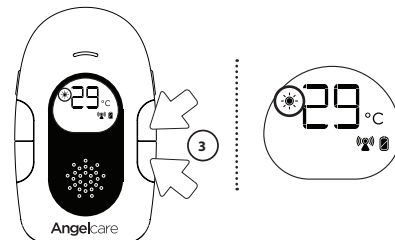

- 3) Villogni kezd a **Magas hőmérséklet** ☀️ ikon. A **FEL** vagy **LE** nyílombokkal állítsa be a **MAGAS** hőmérséklet riasztását (22–37 °C között).
- 4) Nyomja meg az **OK** gombot a következő lehetőségre való ugráshoz vagy a **KILÉPÉS** gombot a választott lehetőség megerősítéséhez.

Az alacsony hőmérséklettartomány 5 ° és 19 °C között van, és a magas hőmérséklettartomány 22 ° és 37 °C között van.






### HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS

- A riasztás akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet eléri a beállított maximális vagy minimális hőmérsékletet.
- A szülői egység 5 másodpercenként egymás után 3-szor sípol, ha a hőmérséklet túllépi a beállított tartományok valamelyikét. A megfelelő ikon a szülői egységen is villog, így értesítve önt.

## 6. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

### 6.1 – A HŐMÉRSÉKLETI RIASZTÁS BE- VAGY KIKAPCSOLÁSA A BABAEGYSÉGEN

Ezzel a beállítással a babaegység hőmérsékletjelzése színt vált, ha az általa mért hőmérséklet a megadott értékek alá esik vagy fölé emelkedik. A hőmérsékletjelzés piros lesz az alapértelmezett fehér helyett, ha a hőmérséklet a felső riasztási érték fölé emelkedik, illetve kék, ha az alsó riasztási érték alá esik.

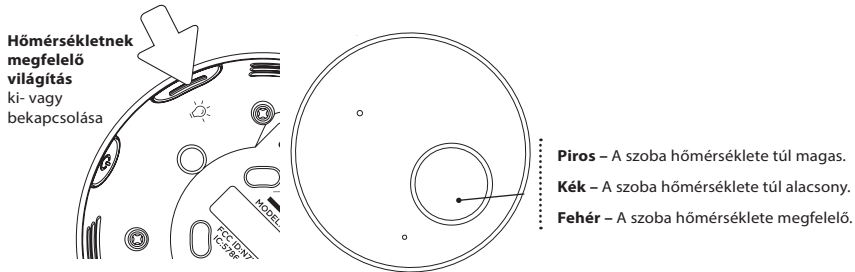

### 6.2 – „HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL” RIASZTÁS

A készülék rendelkezik Hatótávolságon kívül riasztással, mely tájékoztatja önt, ha a két egység nem kommunikál egymással. A hatótávolságon kívüli állapotot okozhatja távolság vagy fizikai interferenciák.

#### HATÓTÁVOLSÁG:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): akár 250 méter.

#### HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL RIASZTÁS

- A riasztás akkor kapcsol be, ha a két egység nem kommunikál.
- A szülői egység 16 másodpercenként hármas síphangot ad ki.
- A képernyőn villogni kezd a Hatótávolságon kívül ikon.




#### FONTOS

Ha kikapcsolja a babaegységet és nem kapcsolja ki a szülői egységet, megszólal a Hatótávolságon kívül riasztás. A kapcsolat visszaállításához kapcsolja újra be a babaegységet.





## A HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSÁHOZ:

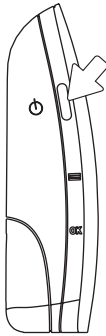

A szülői egység  
kikapcsolásához nyomja  
le 2 másodpercre

VAGY



Bekapcsolja a  
babaegységet.

## 6.3 – SZÜLŐI EGYSÉG KERESŐ FUNKCIÓ

Lehetővé teszi a szülői egység megtalálását.

Nyomja le és  
tartsa lenyomva a  
**Hőmérsékletnek  
megfelelő világítás**  
gombot.



### A SZÜLŐI EGYSÉG MEGKERESÉSÉHEZ:

Nyomja le és tartsa lenyomva a babaegység oldalán található „Hőmérsékletnek megfelelő világítás” gombot. A szülői egység sípoló hangot ad ki.


### A SÍPOLÁS KIKAPCSOLÁSÁHOZ:

Nyomja le bármelyik gombot a szülői egységen vagy a szülői egység kereső gombot a babaegységen.

## HIBAELHÁRÍTÁS

### AZ ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEK KEZELÉSE

- Első használat előtt mindig 10 órán át töltsze az elemeket.
- Az elemek élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott időnként teljesen lemeríteni az elemeket. Az elemek teljesítménye csökkenhet, ha folyamatosan tölti őket. Ha nem használja a szülői egységet, kapcsolja ki.
- A lemerülőben lévő elemek ronthatják a babaórzó teljesítményét. Ha nem elégedett a szülői egység/ babaórzó teljesítményével, cserélje ki az újratölthető elemeket (2 db NiMH újratölthető elem).
- Ajánlott félévente kicserélni az elemeket.

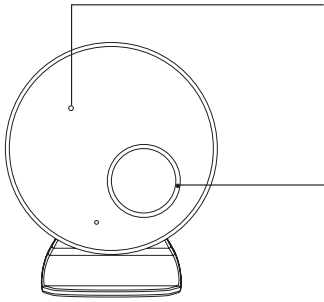



Bekapcsolást jelző lámpa Alacsony töltöttség jelzése	
Zölden villog	A babaegység a tartalék elemekről üzemel.
Sárgán villog	A babaegység elemei kifogyóban vannak.
Zölden világít	A készülék be van kapcsolva


Érzékelőlap jelzőlámpája Hőmérsékletjelzés	
Pirosan villog	Nem érzékel mozgást.
Fehéren villog	A készülék működése szünetel.
Kéken villog	Megszakadt a kapcsolat a babaegység és az érzékelőlap között.
Pirosan világít	A szoba hőmérséklete túl magas.
Kéken világít	A szoba hőmérséklete túl alacsony.
Fehéren világít	A szoba hőmérséklete megfelelő.

## KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA A SZÜLŐI EGYSÉG ÉS A BABAEGYSÉG KÖZÖTT


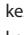
- Ha megszakad a kapcsolat, első lépésként vigye közelebb egymáshoz a szülői egységet és a babaegységet, és ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva, így visszaállhat a kapcsolat. Ha továbbra sincs kapcsolat, és a Hatótávolságon kívül figyelmeztetés sem jelenik meg, akkor, és csak akkor kezdje meg az alább részletezett újrapcsolódási műveletet.

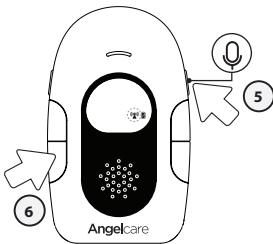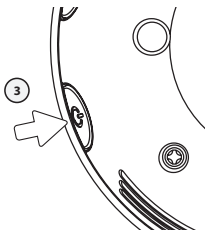

- 1) Kapcsolja ki mindkét egységet.
- 2) Kapcsolja be a babaegységet.
- 3) Nyomja meg a babaegység **főkapcsolóját** 4-szer egymás után.

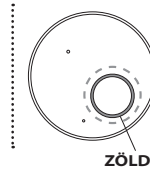


A babaegység érzékelőlap-jelzője gyorsan zölden villog (azt jelzi, hogy a babaegység kapcsolódási módban van).

- 4) Kapcsolja be a szülői egységet Villog a Hatótávolságon kívül  ikon, amely jelzi, hogy a szülői egység kapcsolódási módban van).
- 5) Nyomja le és tartsa lenyomva a szülői egységen a **Válasz** gombot, amíg egy sípszót nem hall.
- 6) Nyomja meg a szülői egységen az **OK** gombot. A Hatótávolságon kívül  ikon gyorsabban kezd villogni, jelezve, hogy a szülői egység kapcsolódási módban van.






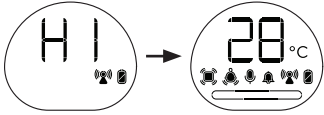


A szülői egység az újrapcsolódás során a H1-H2 ikont jeleníti meg. Az újracsatlakozás akkor sikeres, ha a szülői egységen a szokásos képernyő jelenik meg.

### KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA A BABAEGYSÉG ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐLAP KÖZÖTT

- Ha megszakad a kapcsolat, első lépésként vigye közelebb egymáshoz az érzékelőlapot és a babaegységet, és ellenőrizze, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva, így visszaállhat a kapcsolat. Ha továbbra sincs kapcsolat, akkor, és csak akkor kezdje meg az alább részletezett újrapcsolódási műveletet. Az újrapcsolódási művelet idejére gondoskodjon arról, hogy ne legyen más vezeték nélküli érzékelőlap a szobában.

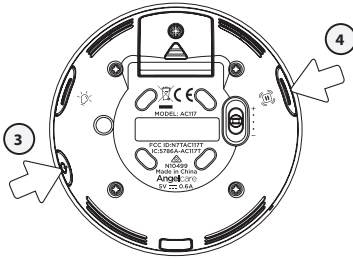


- 1) Kapcsolja ki mindkét egységet.
- 2) Távolítsa el és helyezze vissza az érzékelőlap elemeit.
- 3) Kapcsolja be a babaegységet úgy, hogy 2 másodpercig lenyomva tartja a főkapcsolóját.

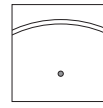

A babaegység bekapcsolásjelzője zölden világít.

- 4) Nyomja le és tartsa lenyomva a babaegység **Szüneteltetés** gombját 3 másodpercig.

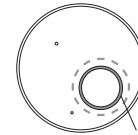

A babaegységen érzékelőlap-jelzője kékén villog.

KÉK

- Az újrapcsolódási művelet 30 másodpercen belül befejeződik.
- Az újrapcsolódás akkor sikeres, amikor a babaegység egy megerősítő hangot ad ki.

#### MEGJEGYZÉS:

Az újrapcsolódási művelet idejére gondoskodjon arról, hogy ne legyen más vezeték nélküli érzékelőlap a szobában.

### TÉVES RIASZTÁSOK

- Kapcsolja ki a babaegységet.
- Győződjön meg róla, hogy nincs ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban.
- Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 6 cm vastag, 33 cm széles és 33 cm hosszú kemény lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap az üzembelyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve.
- Lehet, hogy növelnie kell az érzékenységet (lásd az **5.4-es lépést**).





### NEM SZÓLAL MEG A RIASZTÁS

- Ne érintse meg a kiságyat, amikor a légzésfigyelő be van kapcsolva és távolodjon el a kiságytól legalább 3m-re.
- Helyezze a kiságyat egy szilárd támaszfal mellé, hogy az érzékelőlap ne érzékelje a kiságyon kívüli mozgásokat.
- Tegyen filcet a kiságy lábaira.
- Kapcsolja ki a körforgót, a ventilátort, a hangos zenét és minden mást, amely rezgést okozhat.
- Lehet, hogy csökkentenie kell az érzékenységet (lásd az **5.4-es lépést**).

### NEM VILÁGÍT A BABAEGYSÉG BEKAPCSOLÁSÁT JELZŐ LÁMPA (ZÖLD LÁMPA)

- Ellenőrizze a kapcsolódást, vagy váltson másik konnektorra.
- Kapcsolja be a babaegységet úgy, hogy 2 másodpercig lenyomva tartja a főkapcsolóját.

### GYENGE VÉTEL

- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
- Váltottassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
- Helyezze az egységeket lapos felületre, úgy, hogy a baba ne érje el őket.
- Cserélje ki az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.

### STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS BABAÓRZÓKTÓL, VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOKTÓL, ADÓ-VEVŐKTÓL STB.)

- Fordítsa el a szülői egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléből.

### GERJEDÉS (A SZÜLŐI EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI)

- Helyezze egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méteres távolságra).
- Csökkentse a szülői egység hangerejét.

### A SZÜLŐI EGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐI EGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Kapcsolja vissza a szülői egységet a főkapcsoló lenyomásával és nyomva tartásával.
- Cserélje ki az elemeket, vagy töltsse fel a szülői egységet.

### AZ ÉRZÉKELŐLAP JELZŐLÁMPÁJA PIROSAN VILLOG (A MOZGÁSÉRZÉKELŐ NEM ÉRZÉKEL MOZGÁST)

- Győződjön meg róla, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban.
- Az érzékelőlapnak teljesen lapos és szilárd felületen kell feküdnie. Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 6 cm vastag, 33 cm széles és 33 cm hosszú kemény lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap a üzembe helyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve.
- Lehet, hogy növelnie kell az érzékenységet (lásd az **5.4-es lépést**).

### NINCS ÁRAMELLÁTÁS

- Ellenőrizze és ha szükséges, cserélje az elemeket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.



## KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd az országokra érvényes jótállást mutató táblázat) alatt garantálja, hogy az Angelcare® készülék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a készüléknel a jótállási időszak alatt az utasításoknak megfelelő, rendeltetészerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóinkkal.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének valamint az Önhöz történő visszaküldésének költségeit az Angelcare® viseli.

**A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetészerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a termékben. Az Angelcare® a termék használatá kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semmennyi felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semmennyi más jótállás nem érvényes.**

A jótállás nem vonatkozik a nem az Angelcare márka alá tartozó termékekre és kiegészítőkre, vagy azokra a problémákra, melyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyek nem az Angelcare által mellékelte vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használatából okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VELELENSZERŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKERT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK. AZ ANGELCARE SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYÉIÉRT.

**FONTOS!** Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vegye vissza az üzletbe. Ha kérdése merült fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

A jótállással kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A helyi forgalmazó elérhetőségét a webhelyünkön találja: [international.angelcarebaby.com](http://international.angelcarebaby.com)

JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKOK ORSZÁGONKÉNT	
Észak-Amerika	1 év
Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország, Magyarország, Szlovénia	1 év
Más országok	2 év

## MŰSZAKI ADATOK

### Hatótávolság:

Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen):

- A szülői egység és a babaegység között: akár 250 méter.
- A babaegység és az érzékelőlap között: akár 6 méter.

### Áramellátás:

2 db AAA alkalielem (nincs mellékelve) vagy 100–240 V AC / 5 V DC adapter a babaegységhez.

2 db AAA újratölthető elem és 100–240 V AC / 5 V DC adapter a szülői egységhez.

1 db 3 V-os CR3032 elem (mellékelve) a vezeték nélküli érzékelőlaphoz.

**Vigyázat:** Az áramütés veszélyének enyhítése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Az elemek nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. A szülői egységhez mellékelünk 2 db AAA NiMH újratölthető elemet, amelyeket a GP INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAH, 1,2 V, 600 mAh) gyártott. Csak az Angelcare által javasolt csereelemet használja. Ha a csereelemekkel kapcsolatos információkat szeretne, vegye fel a kapcsolatot az Angelcare ügyfélszolgálatával: [www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com), vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A csereelemek mellett megtalálja a használati útmutatójukat. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.

### Elemek:

- NE használjon együtt régi és új elemeket.
- NE használjon együtt szabványos (szén-cink) alkalielemeket és újratölthető (Ni-CD, NiMH stb.) elemeket.
- **VIGYÁZAT:** A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEM HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT.

### Átvitel:

**A szülői egység és a babaegység közötti adatátvitel az 1,8 GHz és 1,9 GHz közötti frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.**

A babaegység és az érzékelőlap közötti adatátvitel a 2,4 GHz-es frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

### Rádiófrekvenciás jel maximális erőssége:

- 24 dBm (250 mW) a szülői egység és a babaegység között;
- 20 dBm (100 mW) a babaegység és az érzékelőlap között

RF-csatorna száma a szülői egység és a babaegység között: 10  
RF-csatorna száma a babaegység és az érzékelőlap között: 79

Az Angelcare Monitors Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a babafigyelő készülék teljesíti a 2014/53/EU számú irányelv előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: <https://international.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

## VÉDJE A KÖRNYEZETET

Az áthúzott keresek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvények és szabályozások szerint a terméket és/vagy az elemét nem szabad a háztartási hulladék-gyűjtőbe tenni. Amikor a termék vagy az elem elérte az élettartama végét, vegye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az akkumulátorok eltávolításáért lásd a használati útmutatót.

## ERP-MEGFELELÉS

KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ MODELLSZÁMÚ ANGELCARE®  
MÁRKÁJÚ TÁPEGYSÉGEKET HASZNÁLJA:  
EUROPÁI UNIO (IDEÉRTVE NEMETORSZÁGOT) – K05S050060G  
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG – K05S050060B

A készülék megfelelőségét a rajta található jelzések mutatják.



## FÜGGELÉK: INFORMÁCIÓK A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRŐL ÉS A FAJLAGOSAN ELYNELT TELJESÍTMÉNYRŐL (SAR)

A szülői egység tervezése megfelel a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó jelenlegi szabályozásoknak. Ezek a szabályozások tudományos irányelveken alapulnak, amelyek olyan biztonsági korlátokat állítanak fel, amelyek mindenki biztonságát szolgálják, függetlenül az életkoruktól vagy az egészségi állapotuktól. Ezek az irányelvek a rádióhullámoknak való kitettséget a fajlagosan elnyelt teljesítmény (Specific Absorption Rate, SAR) alapján mérik. A SAR-teszteteket szabványos módszerekkel hajtottuk végre úgy, hogy a szülői egység minden általa használt frekvenciáson a legmagasabb engedélyezett teljesítményt sugározta. A Nem-ionizáló Sugárvédelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIRP) által javasolt maximális SAR-szint 2 W/kg, amelyet 10 g szöveten mérnek. A szülői egység által mért SAR-szintek a következők: a tettel közvetlenül érintkezve az 1,8 GHz-es DECT kibocsátás 0,042 W/kg (10 g) teljesítményt eredményezett. Az arc alá helyezve az 1,8 GHz-es DECT kibocsátás 0,021 W/kg (10 g) teljesítményt eredményezett. Ezen eredmények szerint ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó irányelveknek, amikor a testtől 0 mm-re vagy az arc alá helyezik.



## TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi terméke megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységet cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékekre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos használtatta a készüléket, vagy átalakította.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: Isd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.

2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.

3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.

5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.

10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.

11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.





**12.** Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

**13.** A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

**14.** Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

**15.** Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben::

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC117 típusú készülék a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

<b>TERMÉK TÍPUSA:</b> ANGELCARE® AC117 típusú készülék	<b>A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJA:</b>
<b>VÁSÁRLÁS DÁTUMA:</b>	<b>ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS:</b>

## AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységét.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e,
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelelő-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékeszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.

Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.





Ha a gyerek ...	Megfelelő SÜRGŐS intézkedések
...eszéméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazzon szívmasszázst! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik.
...nem lélegzik	
...van pulzusa	
...eszéméletlen	Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik.
...nem lélegzik	
...nincs pulzusa	

## MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő feje pozíció.



### 2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



### 3. Három levegő befúvás

Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilélegzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)





Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsövét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)



## SZÍVMASSZÁZS

### 1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázszt végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázszt matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá kell tenni.

### 2. Nyomási pont

Képzelsen el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujjá így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak



### 3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérell, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázszt, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)



[www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com)



IM117-UK-131217

