

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC417 és AC517 típus

Kamerás légzésfigyelő készülék kétirányú
babaőrzővel és vezeték nélküli érzékelővel



TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|----|
|  FIGYELMEZTETÉSEK | 2 |
| ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK | 3 |
| A szülői egység töltése (9 óra) | 4 |
| Az érzékelőlap elhelyezése | 5 |
| A kamera beállítása | 6 |
| A készülék bekapcsolása | 6 |
| A készülék megismerése | 8 |
| További funkciók bekapcsolása és kikapcsolása | 11 |
| Tartozékok használata | 16 |
| Hibaelhárítás | 16 |
| Korlátozott jótállás | 18 |
| Műszaki adatok | 18 |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ORÍZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS UTASÍTÁSOKAT.

A FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, ILLETVE A TERMÉK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.

AZ ÉRZÉKELŐLAPOT NEM HASZNÁLHATJÁK FELNÖTTÉK ÉS 24 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB GYERMEKEK.

AZ ÉRZÉKELŐLAPOT NE HASZNÁLJA ANNAK ELLENŐRZÉSÉRE, HOGY A GYERMEK A KISÁGYBAN VAN-E.

FIGYELMEZTETÉS

Az összeszerelést felnőtt végezze el.

Összeszerelésnél tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.


Az Angelcare® büszke minden termékére.

Amennyiben ön elégedetlen, vagy kérdése merültek fel:

Egyesült Államok és Kanada: Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: angelcare@cdecinc.na

Más országok: Vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

FIGYELMEZTETÉSEK:

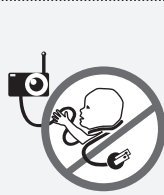

FIGYELMEZTETÉS - Fulladásveszély - Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.

• **TARTSA TÁVOL** a kamerát és az adapterkábeleket a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságra). • **SOHA** ne használjon hosszabítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja. • **A termék NEM játék. SOHA** ne engedjen gyermeket játszani vele.

1. A TERMÉK NEM HELYTESÍTİ A FELELŐSSÉGTELJES FELNÖTT FIGYELMÉT. A termék célja, hogy segítse gyermeke felügyeletét. Ettől függetlenül azonban önmagának a készülék használata mellett is megfelelő figyelmet kell fordítani gyermeke annak biztonsága érdekében. A koraszülött vagy veszélyeztetett gyermekek felügyeletét mindig egy egészségügyi szakértő által előírt módon végezze. A készülék NEM orvosi eszköz, és NEM alkalmas a bölcsőhalál (SIDS) megelőzésére.

2. NE fogja meg a konnektorba bedugott tápegység csuszap végét.

3. MINDIG ügyeljen rá, hogy az adó- és vevőegység megfelelően működjön, és hogy egymás hatósugarán belül helyezkedjenek el. Először használja előt próbálja ki a készüléket, végzetlen rendszeres ellenőrzéseket, és mindig tesztelje működését, ha megváltoztatja a kamera elhelyezkedését.

4. MINDIG azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.

5. NE használja a készüléket víz közelében (pl. fürdőkád, mosogató stb.).



6. Tartsa TÁVOL a készüléket hőforrásoktól (pl. sütő, radiátor stb.).

7. MINDIG sík felületen, függőlegesen helyezze el a kamerát és a szülői egységet, és ügyeljen a megfelelő szellőzésre. NE helyezze kanapéra, párnára, ágyra vagy bármilyen olyan felületre, mely akadályozhatja a levegő szabad áramlását.

8. A készülék nyilvános frekvenciákat használ a jelek továbbítására. A szülői egységet érhetik a környéken található más babaóráktól származó jelek vagy interferencia. A készülék jeleit akár szomszédos lakásokban is foghatják. Magánjelleme védelme érdekében mindig kapcsolja ki a két egységet, ha nem használja őket.

9. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Az összeszerelést felnőtt végezze el. Járjon el óvatosan a termék kicsomagolásánál és összeszerelésénél, és tartsa távol az apró alkatrészeket a gyermekektől.

10. A készülék 10 °C és 40 °C közötti szobahőmérsékleten használható.

ELEMEKRE ÉS AKKUMULÁTOROKRA VONATKOZÓ FIGYELMETETÉS

11. A szülői egység akkumulátora cserélhető lítiumion akkumulátor. A vezeték nélküli érzékelőlap eleme cserélhető lítium gombelem. Csak az Angelcare által javasolt csereakkumulátor használja. A nem megfelelő akkumulátor használata, illetve a nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. Az akkumulátor megfelelő

behelyezésével kapcsolatban lásd a használati útmutatót. NE okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozáson. Az akkumulátor töltésére csak az Angelcare által biztosított hálózati adaptert használja. Ha a szülői egységet hosszabb ideig tervezzi tárolni, vegye ki belőle az akkumulátort. A használt akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A gombelem kis méretű, és fulladást okozhat. Az akkumulátort és az elemet MINDIG tartsa távol a gyermekektől.

12. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

12.1 Tartsa be a figyelmeztetéseket – A termékben és a használati útmutatóban található minden figyelmeztetést be kell tartani.

12.2 Kövesse az utasításokat – Minden, működésére és használatra vonatkozó utasítást követni kell.

12.3 Víz és nedvesség – NE tegye ki víznek a készüléket. Ne helyezze például fürdőkád, lavór, mosogató, mosdóknak közelébe, vagy bármilyen nedves környezetbe, például úszómedence mellé. Ügyeljen arra is, hogy az egységekre NE essenek tárgyak, és ne fröccsenjen folyadék a nyílásokon keresztül az egységekbe vagy az érzékelőlapba.

12.4 Tisztítás – Tisztítás előtt válassza le az egységeket. A készülék semmilyen alkatrészt NE merítse vízbe. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.

12.5 Szellőzés – NE zárja le a szellőzőnyílásokat. Ügyeljen rá, hogy a termék használata közben megfelelően szellőzzön. NE takarja le a kamerát vagy a szülői egységet semmilyen tárggyal (pl. takaró). NE tegye be a készüléket fókba vagy bármilyen olyan helyre, amely tömpti az általa kiadott hangot, vagy akadályozza a levegő szabad áramlását.

12.6 Hőforrások – NE helyezze hőforrás, pl. radiátor, hősugárzó, sütő, televízió vagy egyéb, hő kibocsátó berendezés (pl. erősítő) közelébe. A hő károsíthatja a készülék házat vagy az elektromos alkatrészeket.

12.7 Kábelek védelme – Ügyeljen arra, hogy az érzékelőlap és a tápegység kábelére ne lépjenek rá, és az ne szoruljon be bútorok vagy más tárgyak alá, fölé vagy közé. A tápkábeleket úgy kell vezetni, hogy minél kisebb legyen a lehetőség annak, hogy rájuk lépnek, vagy hogy bútorok vagy más tárgyak alá/fölé/közé szorulnak. Különös figyelmet kell fordítani a vezetékekre és dugaljakra, elosztókra és arra a pontra, ahol a vezetékek kilépnek a termékből. A berendezést helyezze egy könnyen elérhető konnektor közelébe. Az adaptert mindig a berendezéshez legközelebb eső, könnyen elérhető fali aljzathoz csatlakoztassa. A táphálózatról való leválasztáshoz húzza ki a tápegységet.

12.8 Kiegészítők – Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat és kiegészítőket használja. NE helyezze a terméket instabil kiegészítőre, alványra, háromlábú állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, súlyos sérülést okozva a gyermeknek vagy felújíthat, és károsíthatja magát az eszközt is. KIZÁRÓLAG a gyártó által javasolt vagy a termékkel együtt árusított kiegészítő, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon. A termék felszerelését mindig a gyártó utasításainak megfelelően kell végezni.

12.9 Húzza ki a konnektorból a készüléket villámlassal járó viharban, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.

12.10 Szervizelés – NE kíséreljen meg saját kezűleg megjavítani a terméket, mivel a fedél felnyitása vagy eltávolítása (kivéve az elemtároló ajtaját) veszélyes feszültség vagy egyéb veszélynek teheti ki önt.

12.11 Cserealkatrészek – Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy az eredeti alkatrészzel minden szempontból megegyező cserealkatrészt használjon. Nem hivatalos cserealkatrész használata tüzet, áramütést és egyéb veszélyt okozhat.



12.12 Használat – Jelen készülék pusztán a szülők munkájának támogatására szolgál. NEM helyettesíti a felőlés és megfelelő felnőtt felügyeletet, és nem is szabad ennek kiváltására használni. A készüléket KIZÁRÓLAG a jelen használati útmutatóban megadott javaslatok szerint használja.

12.13 Áramforrások – Kizárólag az adapter adattábláján olvasható áramforrásról működtesse a terméket. Erőkelődjön a kereskedőnél vagy a helyi áramszolgáltatónál, ha nem biztos benne, hogy otthonában milyen áramforrás található.

12.14 Tűlterhelés – NE terhelje túl a fali jackokat, hosszabbítókat, vagy egyéb beépített elosztókat. Ez tűz vagy áramütés veszélyével jár.

12.15 Tárgyak és folyadékok bekerülése – SOHA ne nyomjon be tárgyat a termék belsejébe a burkolat résin keresztül, mivel ezek veszélyes feszültségű pontokat érinthetnek, vagy kikapcsolhatják a készüléket, melyek tüzet vagy áramütést okozhatnak. SOHA ne öntsen folyadékot a termékre.

12.16 Antenna – Az adóegységhez használt antennát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 20 cm-es biztonsági távolság álljon fenn közte és a környezetben lévő emberek között. Az antennát nem szabad meghosszabbítani, és tilos bármilyen más antennával vagy adóegységgel együtt használni.

12.17 Elektromos vezeték – A szabad téren elhelyezett antennarendszert TILOS felső elektromos vezeték vagy más elektromos lámpa- vagy áramkör közelébe vagy olyan helyre tenni, ahol részlet ilyen vezetékre vagy áramkörökre. Ezek érintése halálos lehet.

12.18 Rezgés – A légzésfigyelő használata során NE használjon babaórból, körforgót vagy bármely más olyan kiegészítőt, amely rezgést okozhat. Rezgést egy ventilátor, mosógép, hangos zene stb. is okozhat. Ezek a rezgésforrások akadályozhatják az Angelcare® készülék működését, így az nem riad, ha a gyermekem kívül tartósan más mozgást is érzékel. A légzésfigyelő használata során minden rezgésforrást szüntessen meg.

12.19 A téves riasztásnak több oka lehet. A leggyakoribb ok, hogy a készüléket nem kapcsolják ki, miután a gyermeket kivették a kiságyból. További ok lehet, hogy az érzékelőlapot nem megfelelően helyezte az ágymatrac alá. Gondoskodjon arról, hogy az érzékelőlap sík, stabil felületen legyen, és az Angelcare® embléma felé nézzen. Előfordulhat, hogy módosítania kell az érzékenységi szintet. Lásd az 5.1-es lépést. Mindig azonnal ellenőrizze a gyermeket, ha riasztást hall.

12.20 Érzékelőlap – Az érzékelőlap minden nem mozgó kiságban használható. Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 33 x 33 cm méretű, 6 mm vastag kemény lapot, és ezen használja az érzékelőlapot. Az Angelcare® légzésfigyelőt kizárólag mozdulatlan alvókörnyezetben, például kiságban használja, ahol az érzékelőlap teljesen sík, stabil

felületen helyezhető el. Az érzékelőlap műanyagból készült, és nem engedi át a levegőt. Ezért előfordulhat, hogy az érzékelőlap környéke penészedni kezd a matrac alatt. A penészedés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen forgassa meg a matracot.

13. AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

13.1 KIZÁRÓLAG a használati útmutatóban megadott típusú és méretű elemeket és akkumulátorokat használjon. Nem megfelelő típusú elemek és akkumulátorok használata robbanást okozhat.

13.2 Első használat előtt töltsen 9 órán át a szülői egység akkumulátorát. Erre az időszakra kapcsolja ki a készüléket. KIZÁRÓLAG a készülékhez mellékelt tápegységet használja.

13.3 NE használja ezt a tápegységet más berendezésekre.

13.4 Kizárólag kikapcsolt állapotban húzza ki a tápegységet a készülékből.

13.5 NE dobja tűzbe az akkumulátort és elemeket, mert felrobbanhatnak. Ellenőrizze, hogy a helyileg hatályos előírások nem tartalmaznak-e esetleg különleges ártalmatlanítási utasításokat.

13.6 Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok és az elemek kezelésekor ne okozzon bennük rövidzárlatot vezető anyagokkal (pl. gyűrű, karkötő, kulcs). Kerülje az akkumulátorok és elemek túltöltését, rövidzárlat okozását, fordított töltését, rongálását vagy elégetését, mivel ezek következtében mérgező anyagok vagy hidrogén- és/vagy oxigéngáz szabadulhat fel, vagy megnövekedhet a felületi hőmérséklet.

13.7 NE próbálja meg melegtétellel megújítani a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható elemeket. Ennek következtében hirtelen elektrolit folyhat ki az elemekből, ami égési sérüléseket vagy irritációt okozhat a szemben vagy a bőrön.

13.8 Szükség esetén az elemeket ugyanolyan vagy velük (feszültségben és méretben) megegyező elemekre kell cserélni.

13.9 Ha a szülői egységet 30 napnál hosszabb ideig tervezte tárolni, vegye ki belőle az akkumulátort, mivel szivároghat, ami károsíthatja a berendezést.

13.10 A lemerült akkumulátorokat a lehető leghamarabb távolítsa el, mivel ezek nagyobb valószínűséggel folynak ki a termék belsejében. A szivárgó vagy eresztő akkumulátorokat védőesztlyt használata mellett azonnal ki kell cserélni.

13.11 NE tárolja a terméket vagy a termékhez mellékelt vagy azzal együtt használható akkumulátorokat és elemeket magas hőmérsékletű helyen.

ÜZEMBEHELYEZÉSI TUDNIVALÓK

TARTOZÉK:


AC417 és AC517 típus
Kamerás légzésfigyelő készülék
kétirányú babaórzóval és vezeték
nélküli érzékelőlappal



Érintőképernyős szülői egység



Kamera

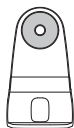

Asztali állvány
eltávolítható, falra
szerelhető fémgolyóval
(a kamera számára)




Csavar
(A fali rögzítéshez
csavarhúzó szükséges)



Vezeték nélküli érzékelőlap

* Mindig úgy helyezze el,
hogy az Angelcare
embléma felfele nézzen.*

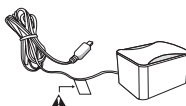

2 db tápegység
(a szülői egység és
a kamera számára)




Lítiumion akkumulátor
(a szülői egység számára)



CR3032 elem
(az érzékelőlaphoz)




1. LÉPÉS - A SZÜLŐI EGYSÉG TÖLTÉSE (9 ÓRA)

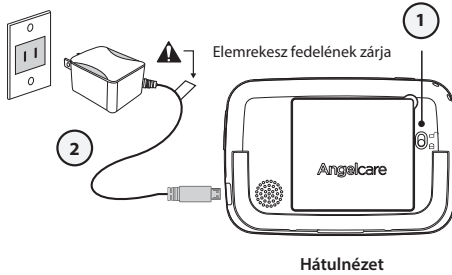

- 1) Nyissa ki a hátalon az elemtartót, és vegye le a fedelét. Helyezze be a mellékelt újratölthető akkumulátort a rekeszbe. Igazítsa össze az akkumulátor és a rekesz érintkezőit.
- 2) Csatlakoztassa az USB-kábelt a szülői egységhez, és csatlakoztassa a tápegységet egy konnektorhoz.
- 3) Első használat előtt töltsen **9 órán át folyamatosan az egységet.**

SZÜLŐI EGYSÉG:

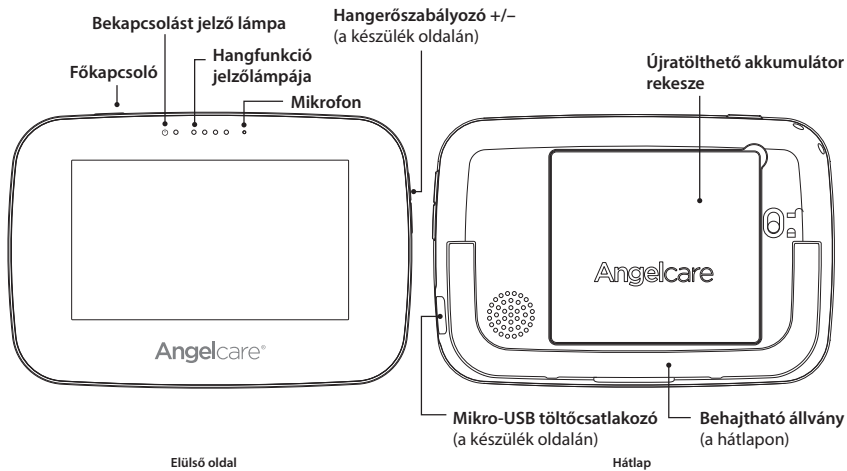

⚠ FIGYELMEZTETÉS - Fulladásveszély – Előfordult, hogy a kábelekbe belegabalyodott gyermekek MEGFULLADTAK.

- **TARTSA TÁVOL** a kamerát és az adapterkábeleket a gyermekektől (legalább 1 méteres távolságra).
- **SOHA** ne használjon hosszabítókábeleket az adapterekhez. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt adaptereket használja.
- **A termék NEM játék. SOHA** ne engedjen gyermeket játszani vele.






2. LÉPÉS - AZ ÉRZÉKELŐLAP ELHELYEZÉSE

2.1 – AZ ÉRZÉKELŐLAP ÁRAMELLÁTÁSA

Amikor először használja az érzékelőlapot, be kell helyeznie a mellékelt CR3032 elemet.

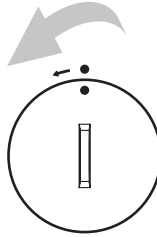

- 1) Távolítsa el az elemfedelelet egy pénzérme segítségével. Fordítsa a nyíl irányába.
- 2) Helyezze be a mellékelt CR3032 elemet a rekeszbe. **Megjegyzés:** A + szimbólumnak felfele kell néznie.
- 3) Helyezze vissza az elemfedelelet (a két pont egy vonalba kerül). Az érzékelőlap most be van **kapcsolva**.

2.2 – HELYEZZE EL AZ ÉRZÉKELŐLAPOT A ÁGYRÁCSRA

FONTOS


Ha a kiságyban nincs szilárd, stabil felület az érzékelőlap számára, egy kemény lapot kell alá helyezni a rendszer megfelelő működése érdekében.

Ez a kemény lap legyen legalább 6 mm vastag, 33 cm széles és 33 cm hosszú, nagyobb, mint az érzékelőlap felülete.

Az érzékelőlap memóriahabos matracok, üreges belsejű matracok és vízágyak kivételével bármilyen méretű és típusú matracal használható. A kemény lap állandó nyomást biztosít az érzékelőlapnak, így az akkor is képes érzékelni a baba mozgását, ha az a kiságy szélén tartózkodik.



Falap

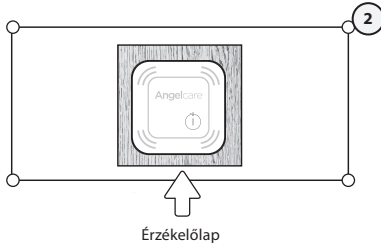

Érzékelőlap

- 1) Távolítsa el a matracot a kiságyból.
- 2) Helyezze az érzékelőlapot az **Angelcare® emblémával felfelé** a ágyrács közepére. Ha alsó kemény lapra is szüksége van, akkor ennek a közepére kell helyezni.
- 3) Helyezze vissza a matracot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Az érzékelőlapot nem használhatják felnőttek és 24 hónaposnál idősebb gyermekek.
- A baba 24 hónapos kora után ne használja tovább az érzékelőlapot. Kapcsolja ki a mozgásérzékelő funkciót, majd vegye ki az érzékelőlapot a kiságyból, és őrizze meg későbbi használatra.
- **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:** Ellenőrizze, hogy az egység készen áll-e a használatra. Az útmutatóban talál információt arról, hogyan ellenőrizheti az üzembe helyezés helyességét.







3. LÉPÉS - A KAMERA BEÁLLÍTÁSA

3.1 – VÁLASSZON EGY HELYET A KAMERÁNAK


A kamera a falra vagy az asztali állványra szerelhető fel. A választott helytől függően előfordulhat, hogy a kamera felszereléséhez el kell távolítania a fémgolyót.

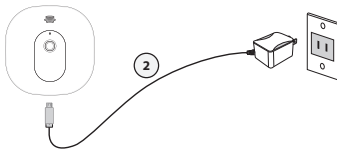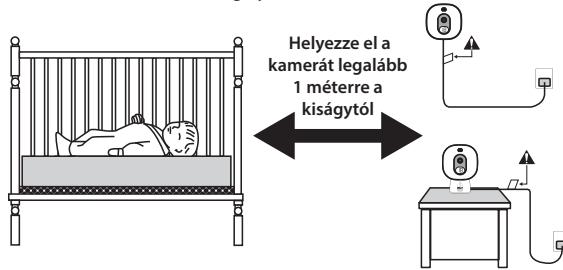

- 1) Helyezze el a kamerát legalább **1 méterre** a kiságytól.
- 2) Csatlakoztassa a tápegység egyik végét a kamerához, a másik végét pedig egy konnektorba.

Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a kamerát, az automatikusan kalibrálja a belső hőmérsékletét a pontosságának biztosítása érdekében. Ez kb. 30 másodpercet vesz igénybe. A színváltási hőmérsékletjelzés alapértelmezetten ki van kapcsolva. Ezt a szülői egység beállításai között kapcsolhatja vissza.

KAMERA

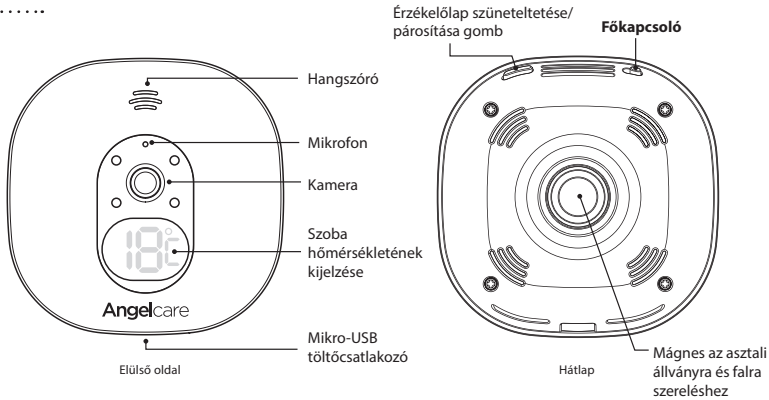

4. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

4.1. A KAMERA BEKAPCSOLÁSA




- 1) Csúsztassa a kamera főkapcsolóját **BE** állásba.



4.2. A SZÜLŐI EGYSÉG BEKAPCSOLÁSA

A kamera és a szülői egység előre párosítva vannak.

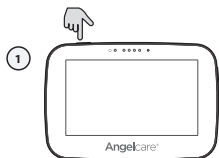

- 1) Nyomja le és tartsa lenyomva a szülői egység főkapcsolóját 2 másodpercig, amíg az LCD-képernyője be nem kapcsolódik. Megjelenik az Angelcare emblémája 1 másodpercig.



Az állapotjelző sávban megjelenik a kamera vezeték nélküli kapcsolatának erősségét jelző ikon.



Ha a szülői egység be van kapcsolva, a kamera pedig nincs, a szülői egységen a **Hatótávolságon kívül** ikon jelenik meg.



Ha 15 másodpercig nincs kapcsolat a két egység között, a szülői egységen megszólal a **Hatótávolságon kívül** riasztás (lásd a **Hibaelhárítás** részt):

- A képernyőn és az infósávon megjelenik a **Hatótávolságon kívül** ikon, és a szülői egység sípolni kezd.

FONTOS IKONOK AZ INFÓSÁVON

A vezeték nélküli érzékelőlap eleme kifogyóban van

A vezeték nélküli érzékelőlap elemének töltése megfelelő

Az érzékelőlap működése szünetel

Érzékelőlap riasztása

Megszakadt a kapcsolat az érzékelőlappal

A kamera képet jelenít meg, és hangot játszik le

„Kattogás” ikon

VOX ikon

Hőmérsékleti riasztások ikonja

Vételi minőség ikonjai

Hangerő ikonjai

Akkumulátor töltöttségi szintje

Túl hideg


Túl meleg

Hatótávolságon kívül

Teljesen feltöltött akkumulátor (csak akkor jelenik meg, amikor a szülői egység a tápegységhez van csatlakoztatva).

4.3 – A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Amikor először bekapcsolja a szülői egység, az arra kéri, hogy az adatok rögzítéséhez adja meg a dátumot és időt. Ha átugorja ezt a lépést, később bármikor visszatérhet ide a beállítások menüjéből.

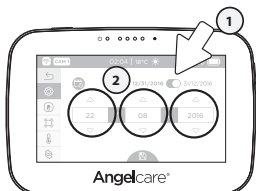

- 1) A hónap/nap/év és nap/hónap/év kijelzés közötti váltáshoz koppintson a **Dátummegjelenítési mód** választógombra.

- 2) Állítsa be a napot, hónapot és évet a **fel/le nyilakkal** . Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

4.4 – AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA



- 1) A 12 órás és 24 órás mód közötti váltáshoz koppintson az **Időmegjelenítési mód** választógombra.
- 2) Állítsa be az órát és a percet a **fel/le nyilakkal** \triangle ∇ . Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

FONTOS


Az érzékelőlap automatikusan **BEKAPCSOL**, amikor a képernyő visszatér videómegjelenítési nézetbe.

5. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK MEGISMERÉSE

Az Angelcare® készülék gyári és a felhasználó által beállított beállításokkal egyaránt használható.

FONTOS

A beállítások megerősítéséhez mindig meg kell nyomni a képernyő alján lévő Mentés ikont (az ikon kék lesz, ha módosításokat kell menteni).

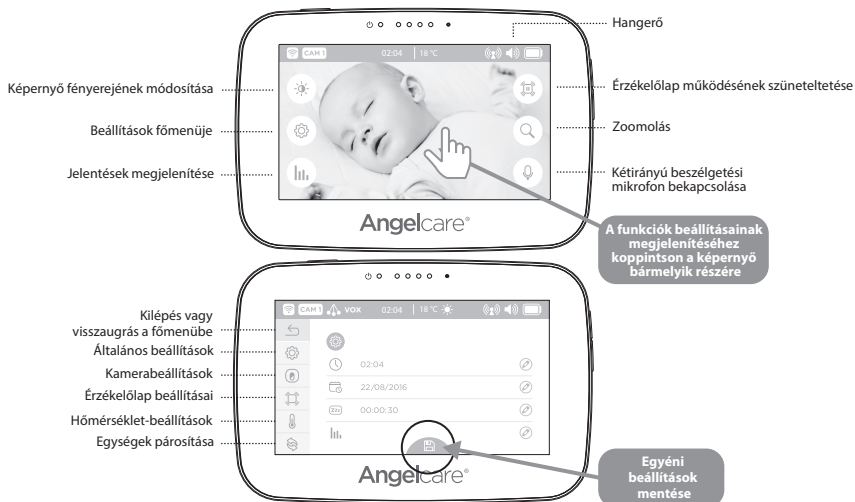

FONTOS

Amikor a menükben és almenükben lépked, a rendszer ideiglenesen lekapcsolja a szülői egység és kamera közötti hangátvitelt. CSAK a mozgáskimaradás miatti riasztás marad aktív (ha a funkció be van kapcsolva).

5.1 – ÉRZÉKELŐLAP

AZ ÉRZÉKELŐLAP KI- VAGY BEKAPCSOLÁSÁHOZ:




- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) Koppintson az **Érzékelőlap** ikonra.
- 3) Az érzékelőlap be- vagy kikapcsolásához koppintson az **Érzékelőlap** választógombra (a választógomb kék lesz). Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

AZ ÉRZÉKELŐLAP TESZTELÉSÉHEZ:

FONTOS

- Első használat előtt próbálja ki a készüléket.
- Tesztelje rendszeresen a készülék megfelelő működését.
- Próbálja ki a készüléket minden alkalommal, ha új helyre teszi az érzékelőlapot.

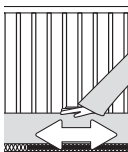

- 1) Az érzékelőlap bekapcsolása után 20 másodpercig szól a riasztás.
- 2) Finoman mozgassa a kezét a matracon, így leállítva a riasztást.

MOZGÁSKIMARADÁS MIATTI RIASZTÁS

- Ha a készülék 15 másodperc elteltével NEM érzékel mozgást, egyetlen kattogást, azaz riasztás előtti figyelmeztető hangot ad ki.
- Ha 5 további másodperc elteltével SEM érzékel mozgást, a szülői egység és a kamera hangszórói folyamatos sípszót adnak ki: ez a mozgáskimaradás miatti riasztás.
- Az LCD-képernyőn megjelenik a Mozgásriasztás ikon.




HA A RIASZTÁS NEM SZÓLAL MEG

- Amikor az érzékelőlap üzemel, ne érjen a kiságyhoz.
- A rezgések csökkentése érdekében támassza a kiságyat falnak.
- Állítsa be az érzékelőlap érzékenységi szintjét.
- Kapcsolja ki a körforgót, a ventilátort, a hangos zenét és minden mászt, amely rezgést okozhat.

AZ ÉRZÉKELŐLAP MŰKÖDÉSNEK SZÜNETELTETÉSÉHEZ ÉS ÚJRAINDÍTÁSÁHOZ:

Lehetővé teszi az érzékelőlap működésének szüneteltetését, amikor kiveszi a babát a kiságyból például etetéshez vagy dédelgetéshez.

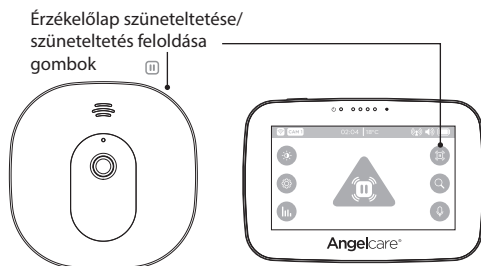




FONTOS

- Ha nem szünetelteti az érzékelőlap működését, és az a baba matracán nem észlel mozgást 20 másodpercig, megszólal a riasztás.
- Mielőtt visszatenné a babát a babaágyba, indítsa el újra az érzékelőlapot.



A KATTOGÁS FUNKCIÓ BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁHOZ:



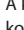



- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) Koppintson az **Érzékelőlap**  ikonra.
- 3) A kattogás funkció bekapcsolásához koppintson a **Kattogás**  választógombra (a választógomb kék lesz). Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJÉNEK BEÁLLÍTÁSA:

A baba, a kiságy és az üzembe helyezési körülményeknek megfelelően a főmenüben beállíthatja az érzékelőlap érzékenységét. Állítson be magas érzékenységet újszülött, illetve alacsonyabbat az idősebb és súlyban gyarapodó gyerek számára. Vastagabb matrac esetében szintén magasabb érzékenységre van szükség.

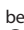

- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) Koppintson az **Érzékelőlap**  ikonra.
- 3) Az **érezékelőlap** érzékenységi szintjének beállításához koppintson a  vagy  lehetőségre. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

5.2 – HANG

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSÁHOZ VAGY A HANG NÉMÍTÁSÁHOZ:



A hangerő beállításához nyomja meg a **Hangerő növelése** vagy **Hangerő csökkentése** gombot.



A hang némításához nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot, amíg meg nem jelenik a némítás jele.

FONTOS

A visszacsatolás (fűtyülő hang) elkerülése vagy a szülői egység hangerejének csökkentése érdekében helyezze el egymástól legalább **3 méteres** távolságban az egységeket.


HA NINCS HANG:

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva mindkét egység.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szülői egység nincs elnémítva.
- Tegye közelebb a szülői egységet a kamerához.

5.3 – AKKUMULÁTOR

AZ AKKUMULÁTOR ELLENŐRZÉSÉHEZ:

Húzza ki a tápegységet a szülői egységből, és ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

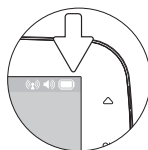

1/4 töltöttség 1/2 töltöttség 3/4 töltöttség tele



A SZÜLŐI EGYSÉG AKKUMULÁTORÁNAK FELTÖLTÉSÉHEZ:

A szülői egység teljes feltöltéséhez csatlakoztassa a tápegységhez, azt pedig a konnektorba, és hagyja ott. Az akkumulátor már 1/4 kapacitáson is megfelelően működik, javasoljuk azonban, hogy töltsse fel teljesen.

A SZÜLŐI EGYSÉG AKKUMULÁTORMERÜLÉSI RIASZTÁSA












- A riasztás akkor kapcsol be, ha az akkumulátort fel kell tölteni.
- A szülői egység 30 másodpercenként sípoló hangot hallat.
- Az LCD-képernyőn megjelenik az **Akkumulátormerülési riasztás** ikon.





KÉSZEN ÁLL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | szülői egység hangereje: | 3. szint (a 4-ből) |
|  | Kamera hangszórójának hangereje: | 3. szint (a 4-ből) |
|  | Légzésfigyelő mód: Érzékelőlap érzékenysége: | BE 2. szint (a 4-ből) |
|  | „Kattogás” funkció | kikapcsolva |
|  | Hőmérséklet mértékegysége: Hőmérsékleti riasztás: | Celsius kikapcsolva |
|  | Kamera hőmérsékletjelzése: | bekapcsolva |
|  | Kamera színváltása: | kikapcsolva (fehér szín) |
|  | Mozgás és hőmérséklet felügyelete: | bekapcsolva |
| VOX | Hangra aktiválás (VOX): | BE |
|  | VOX érzékenysége: | 2. szint (a 4-ből) |
|  | Képernyővédő időzítője: | 30 másodperc |
|  | LCD-képernyő fényereje: | 3. szint (az 5-ből) |



6. LÉPÉS - TOVÁBBI FUNKCIÓK BEKAPCSOLÁSA ÉS KIKAPCSOLÁSA

6.1 – KÉTIRÁNYÚ BESZÉLGETÉS

A szülői egység **Kétirányú beszélgetés** funkcióval is el van látva, amelynek segítségével távolról beszélhet a babához.




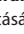
A KÉTIRÁNYÚ BESZÉLGETÉS BEKAPCSOLÁSÁHOZ:



- 1) A **Kétirányú beszélgetés** funkció bekapcsolásához koppintson a **Mikrofon**  ikonra, és tartsa megérintve (az ikon nagyobb és kék lesz).
- 2) A **Kétirányú beszélgetés** funkció kikapcsolásához vegye el az ujját a **Mikrofon**  ikonról.

A KAMERAHANGSZÓRÓ HANGEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSÁHOZ:



- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) A kamera beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Kamera**  ikonra.
- 3) A **Kétirányú beszélgetés** hangerejének beállításához koppintson a  vagy  lehetőségre. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.





6.2 – HANGRA AKTIVÁLÁS (VOX) VAGY FOLYAMATOS HANGTOVÁBBÍTÁS MÓD

Segítségével beállíthatja, hogy hogyan adjon hangot a babaőr. A babaőr Hangra aktiválás (**VOX bekapcsolva**) funkciója alapértelmezetten be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy csak hang észlelése esetén kezd el hangot továbbítani, a beállított érzékenységi szintnek megfelelően. Energiatakarékosság céljából az átvitel leáll, ha 10 másodpercen át nem érzékel hangot. Hang észlelése esetén a továbbítás automatikusan újraindul.



Alternatív módon használhatja a **Folyamatos hangtovábbítás** módot (**VOX kikapcsolva**) is. Ebben a hangfigyelés folyamatosan be van kapcsolva, és a készülék továbbítja az összes hangot.

MEGJEGYZÉS:

A **VOX** kikapcsolásával a Folyamatos hangtovábbítás mód kapcsol be.





A VOX FUNKCIÓ KI- VAGY BEKAPCSOLÁSÁHOZ:



- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) A **Kamera** beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Kamera**  ikonra.
- 3) A **VOX** funkció be- vagy kikapcsolásához koppintson a **VOX** választógombra. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

A HANGÉRZÉKENYSÉG (VOX) BEÁLLÍTÁSÁHOZ:


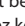



- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) A **Kamera** beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Kamera**  ikonra.
- 3) A **VOX érzékenysége** beállításához koppintson a  vagy  lehetőségre. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

6.3 – SZOBA HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELEZÉSE

CELSIUS FOKRÓL FAHRENHEIT FOKRA VÁLTÁSHOZ:



- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) A hőmérséklet beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Hőmérséklet**  ikonra.
- 3) A hőmérséklet mértékegysége beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Szerkesztés**  ikonra.



- 4) A **°C** és a **°F** közötti váltáshoz koppintson a **Hőmérséklet mértékegysége** választógombra. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.






HÖMÉRSÉKLETI RIASZTÁS

- A riasztás akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet eléri a beállított maximális vagy minimális hőmérsékletet.
- A szülői egység 5 másodpercenként 4 egymást követő sípoló hangot ad ki.
- Az LCD-képernyőn megjelenik a **Hőmérsékletriasztás** ikon.


A HÖMÉRSÉKLETI RIASZTÁS BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁHOZ:

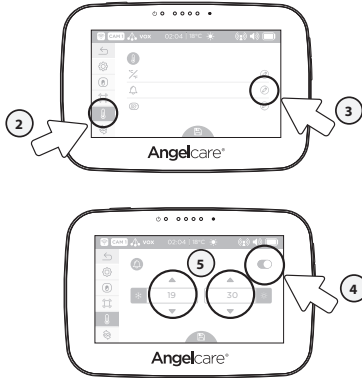

- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A hőmérséklet beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Hőmérséklet** ikonra.
- 3) A hőmérsékleti riasztás beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Szerkesztés** ikonra.
- 4) A riasztási funkció bekapcsolásához koppintson a **Hőmérséklet riasztás** választógombra (a választógomb kék lesz).
- 5) Állítsa be az alsó és felső hőmérsékleti határértéket a **fel/le nyilakkal** . Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

A KAMERA HÖMÉRSÉKLET-KIJELZÉSE ÉS SZÍNVÁLTÁSA

Megadhatja az LCD-kijelző beállításait. Teljesen kikapcsolhatja a kijelzőt, vagy beállíthatja a hőmérséklet színváltó jelzését. Ezzel a beállítással a kamera képernyője szint vált, amikor az általa mért hőmérséklet a megadott értékek alá esik vagy fölé emelkedik. A kamera LCD-képernyőre piros lesz, ha túl magas, kék, ha túl alacsony, illetve fehér, ha megfelelő hőmérsékletet mér.

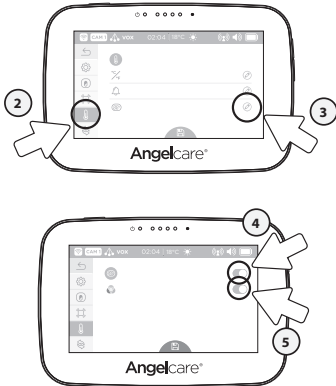

- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A hőmérséklet beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Hőmérséklet** ikonra.
- 3) A kamera LCD-kijelzési menüjének megnyitásához koppintson a **Szerkesztés** ikonra.
- 4) A kamera LCD-kijelzőjének be- vagy kikapcsolásához koppintson az **LCD-kijelző** választógombra.
- 5) A színváltási funkció bekapcsolásához koppintson a **Színváltás** választógombra (a választógomb kék lesz). Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

6.4 – KÉPERNYŐVÉDŐ

Beállíthatja a képernyővédőt.



- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások** ikonra.
- 2) A képernyővédő beállítási menüjének megnyitásához koppintson a **Szerkesztés** ikonra.





- 3) A képernyővédő be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Képernyővédő** választógombra (a választógomb kék lesz).
- 4) Koppintson a 30 másodperc és 3 perc közötti váltáshoz. Ezután a beállítások mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

KÉZI BEÁLLÍTÁS:

A képernyővédő kézi bekapcsolásához nyomja meg rövid ideig a szülői egység főkapcsolóját.

MEGJEGYZÉS:

Amikor aktív a **Képernyővédő** mód, az érintőképernyő fekete. **Videó** módba való visszatéréshez koppintson a képernyőn bárhová.

6.5 – MOZGÁS ÉS HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETE

A mozgáselemzésnek és a hőmérséklet figyelésének köszönhetően követheti a baba alvását, így hozzá igazíthatja az idejét, és válaszolhat a szükségleteire. A mozgásérzékelő 10 másodpercenként rögzíti az észlelt adatokat. Óránként háromszor a rendszer összegzi az összegyűjtött adatokat, és mozgásjelentésként jeleníti meg a szülői egységen.



A MOZGÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLETFELÜGYELET RIASZTÁS BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁHOZ:

FONTOS

A mozgás- és hőmérsékleti adatok rögzítéséhez állítsa be a dátumot és időt a **4.3-as** és **4.4-es lépésekben**.

A használat első 20 percében nem jeleníthetők meg jelentések, mivel a rendszer ekkor gyűjti össze az első megjelenítendő adatkészletet. Ezalatt a Jelentés  ikon nem aktív.





- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) A felügyeleti beállítások megnyitásához koppintson a **Szerkesztés**  ikonra.




- 3) A felügyeleti funkció be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Felügyelet** választógombra (a választógomb kék lesz).







- 4) A korábbi adatok törléséhez koppintson a **Lomtár**  ikonra. Ha még nem mentett adatokat, ez az ikon nem jelenik meg (illetve 20 perccel azután jelenik meg, hogy bekapcsolja ezt a funkciót).
- 5) A korábbi adatok törlésének visszavonásához koppintson a **Vissza**  nyílra. Ezzel visszatér az előző képernyőre.

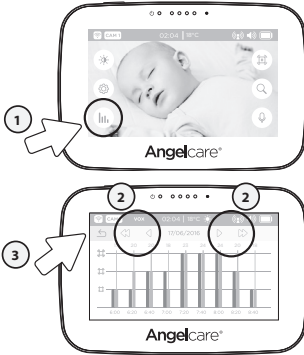NAVIGÁLÁS A MOZGÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLET-FELÜGYELETI JELENTÉSEKBEN:



- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Jelentés**  ikonra.
- 2) A mozgás- és hőmérsékletfelügyeleti jelentésekben való óráról órára vagy napról napra navigációhoz koppintson a nyilakra.
- 3) A videómegjelenítési nézethez való visszatéréshez koppintson a **Vissza**  nyílra.

A FELÜGYELET SORÁN MEGJELENŐ FONTOS GOMBOK ÉS IKONOK

Navigációs ikonok:



◀ Ugrás az előző lapra ▶ Ugrás a következő lapra ◀◀ Ugrás az előző napra ▶▶ Ugrás a következő napra

Hőmérsékletjelzés: A kék sáv a szoba hőmérsékletét jelzi.

Az érzékelőlap mozgási szintjei: A piros sáv az érzékelőlap által észlelt mozgás mennyiségét jelzi.

Kevés mozgás Közepes mozgás Sok mozgás
0–20 mozdulat 20–30 mozdulat Több mint 30 mozdulat




Jelentésekkel kapcsolatos ikonok:

 Azt jelzi, hogy riasztás következett be a felügyeleti időszak alatt  Azt jelzi, hogy a rendszert kikapcsolták a felügyeleti időszak alatt

6.6 – AZ LCD-KÉPERNYŐ FÉNYEREJE

Beállíthatja a szülői egység LCD-képernyőjének fényerejét.






- 1) A fényerő csökkentéséhez vagy növeléséhez koppintson a  vagy  gombra.
- 2) Nyomja meg újra a **Fényerő**  ikont, ezzel visszatér a főmenübe.



6.7 – NAGYÍTÁS

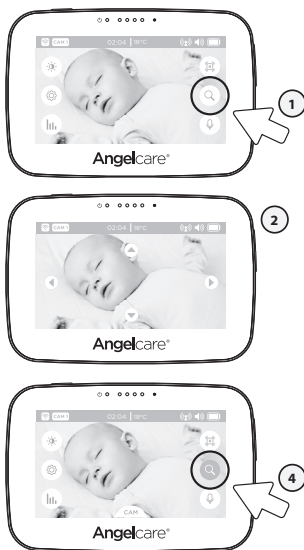A normál nézet kétszeresére lehet zoomolni vele.



- 1) A nagyítási funkcióhoz koppintson a **Nagyítás**  ikonra.
- 2) A **nyíl**gombok segítségével keresse meg, amire szeretett volna ráközelíteni.
- 3) A főmenühöz való visszatéréshez koppintson a képernyő bármelyik részére, kivéve a nyilakat. A kamera megőrzi a nagyított nézetet. Ilyenkor a **Nagyítás** ikon kék lesz.
- 4) A normál megjelenítési módba való visszatéréshez koppintson a kék **Nagyítás**  ikonra. Ezzel kikapcsolja a nagyítást.

7. LÉPÉS - TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

Az Angelcare készülékhez további kamerákat is használhat. Ezek beszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazókkal.

FONTOS

- Ha az Angelcare készülékhez érzékelőlap van csatlakoztatva, ezt **KIZÁRÓLAG** az 1. kamerával lehet párosítani. A szülői egység riasztása csak akkor szólal meg, ha az 1. kamera van kiválasztva, vagy az osztott nézet aktív. Ha egy másik kamera van kiválasztva, a riasztás csak az 1. kamerán szólal meg.
- Hangot csak az egyik kamera fog kiadni. Osztott képernyős nézetben a szülői egységtől érkező hangot az infósávon kijelzett számú kamera fogja kiadni.

HIBAEHÁRÍTÁS






AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE

- Első használat előtt töltsd az akkumulátort 9 órán át.
- Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében ajánlott időnként teljesen lemeríteni azt. Ha nem használja a szülői egységet, kapcsolja ki.

KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA A KAMERA ÉS A SZÜLŐI EGYSÉG KÖZÖTT


- Ha megszakad a kapcsolat a kamera és a szülői egység között, az újbóli párosításukhoz kövesse az alábbi lépéseket.



- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) Az eszköz párosítási menüjének megnyitásához koppintson a **Párosítás**  ikonra.
- 3) Az 1. párosított kamera törléséhez koppintson a **Lomtár**  ikonra. Ha megjelenik a **Lomtár**  ikon, koppintson a **+**  ikonra az 1. kamera párosításához.



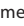



..... A babaegység bekapcsolást jelző lámpája villogni kezd, így jelezve, hogy kapcsolatlétesítési módban van.

- 4) Nyomja meg és tartsa lenyomva 2-3 másodpercig a kamera jobb felső sarkában található **Szünetletetés/párosítás** gombot.
- 5) Amikor megjelenik a **Lomtár**  ikon, a kamera párosítva van.



KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSA AZ ÉRZÉKELŐLAP ÉS A KAMERA KÖZÖTT

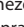.....
 • Ha megszakad a kapcsolat az érzékelőlap és a kamera között, az újbóli párosításukhoz kövesse az alábbi lépéseket.

- 1) Videómegjelenítési nézetben koppintson a **Beállítások**  ikonra.
- 2) Az eszköz párosítási menüjének megnyitásához koppintson a **Párosítás**  ikonra.
- 3) Az érzékelőlap párosításának törléséhez koppintson a **Lomtár**  ikonra, ha ez megjelenik, majd az érzékelőlap újbóli párosításához koppintson a **+**  ikonra.



..... A babaegység bekapcsolást jelző lámpája villogni kezd, így jelezve, hogy kapcsolatlétesítési módban van.

- 4) Az érzékelőlap párosításához koppintson a **+**  ikonra.
- 5) Amikor megjelenik a **Lomtár**  ikon, az érzékelőlap párosítva van.

NEM HALLATSZIK A HANG

-
- Ellenőrizze, hogy a szülői egység és a kamera hangereje megfelelőre van-e állítva.
 - Próbálja a szülői egységet közelebb hozni a kamerához, hogy megnézze, van-e hang.
 - Töltse fel a szülői egységet.

GYENGE VÉTEL

-
- Vigye közelebb egymáshoz az egységeket.
 - Változtassa meg az egyik vagy mindkét egység helyzetét.
 - Helyezze az egységeket lapos felületre, úgy, hogy a baba ne érje el őket.
 - Töltse fel a szülői egységet.

STATIKUS ZAJ, TORZÍTÁS, INTERFERENCIA (MÁS BABAÖRZŐKTŐL, VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONOKTÓL, ADÓ-VEVŐKTŐL STB.)

-
- Fordítsa el a szülői egységet, vagy vigye el az interferencia forrásának közeléből.

GERJEDÉS (A SZÜLŐI EGYSÉG HANGOS ZAJT AD KI)

-
- Helyezze egymástól távolabb az egységeket (legalább 3 méterre).
 - Csökkentse a szülői egység hangerejét.



A SZÜLŐEGYSÉG KÉPERNYŐJE FEKETE (A SZÜLŐEGYSÉG KI VAN KAPCSOLVA)

- Kapcsolja vissza a szülői egységet a **főkapcsoló** lenyomásával és 2 másodpercen át történő nyomva tartásával.
- Töltse újra a szülőegységet.

TÉVES RIASZTÁSOK

- Kapcsolja ki a kamerát.
- Győződjön meg arról, hogy nincsen ágynemű a matrac és az érzékelőlap között, illetve hogy nem szorul-e a matrac a kiságyban.
- Ha a kiságy alja rugós, helyezzen rá egy legalább 33 x 33 cm méretű, 6 mm vastag kemény lapot, és ezen használja az érzékelőlapot.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelőlap az üzembehelyezési tudnivalóknak megfelelően van elhelyezve. Előfordulhat, hogy be kell állítania az érzékenységet. További információkért lásd az **5.1-es lépést**.

NEM SZÓLAL MEG A RIASZTÁS

- Ne érintse meg a kiságyat, amikor a légzésfigyelő be van **kapcsolva** távolodjon el a kiságytól legalább 3m-re.
- Helyezze a kiságyat egy szilárd támaszfal mellé, hogy az érzékelőlap ne érzékelje a kiságyon kívüli mozgásokat.
- Tegyen filcet a kiságy lábaira.
- Lehet, hogy csökkentenie kell az érzékenységet. További információkért lásd az **5.1-es lépést**.

A SZÜLŐI EGYSÉG NEM MUTAT MOZGÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLET-FELÜGYELETI JELENTÉSEKET

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az idő és a dátum be van állítva. Lásd a **4.3-as** és **4.4-es lépéseket**.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy be van kapcsolva a mozgás- és hőmérséklet-felügyeleti jelentéskészítési funkció. Lásd a **6.5-ös lépést**.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Angelcare® a termék eredeti tulajdonosa felé a jótállási időszak (lásd a jótállási időszakokat országokként mutató táblázatot) alatt garancia, hogy az Angelcare® készülék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben a készülékkel a jótállási időszak alatt az utasításoknak megfelelő, rendeltetészerű használat esetén hibás működést tapasztal, az Angelcare® saját döntése szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállás és a jótállási időszak érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóknál.

A termékhez mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, ami lehet a termékről kapott számla vagy bármilyen más dokumentum, mely igazolja, hogy a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem múlt el. A termék javításának vagy cseréjének valamint az Onhez történő visszaküldésének költsége az Angelcare® viseli.

A jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, mely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségen történő használat vagy más, nem rendeltetészerű használat következtében sérült meg. A jótállás semmissé válik abban az esetben is, ha a tulajdonos bármilyen javítást vagy módosítást végez a terméken. Az Angelcare® a termék használata kapcsán az ebből adódó esetleges következményekért semminemű felelősséget nem vállal. A jótállás kizár minden, fent nem ismertetett felelősséget. Semminemű más jótállás nem érvényes.

A jótállás nem vonatkozik a nem Angelcare® márkájú termékekre és kiegészítőkre és azokra a problémákra, amelyek a termékhez tartozó utasításokkal ellenkező használatból vagy azok figyelmen kívül hagyásából adódnak, vagy amelyek nem az Angelcare® által mellékelte vagy gyártott kiegészítők, alkatrészek vagy tartozékok használata okozott.

A TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGOK ORSZÁGONKÉNT VÁLTOZNAK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILOS A VELETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZTMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁVAGY KORLÁTOZÁSA, TEHÁT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM ÉRVÉNYESEK.

FIGYELJEN! A KÖVETKEZŐK SEMMILYEN MÓDON ÉS ESETBEN NEM FELELŐS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYÉIRŐL.

FONTOS! Ez az Angelcare® készülék higiéniai terméknek minősül. Kérjük, ne vigye vissza az üzletbe. Ha kérdése merül fel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, mielőtt visszavinné a terméket az üzletbe.

| JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKOK ORSZÁGONKÉNT | |
|---|------|
| Észak-Amerika | 1 év |
| Egyesült Királyság, Dél-Afrika, Oroszország Magyarország, Szlovénia | 1 év |
| Más országok | 2 év |

Elemek:
FIGYELEM: A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ ELEM VAGY AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁST OKOZHAT.

Átvétel:
A szülői egység és a kamera közötti adatátvitel a 2,4 GHz-es frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

A kamera és az érzékelőlap közötti adatátvitel a 2,4 GHz-es frekvencián valósul meg Európában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában.

Rádiófrekvenciás jel maximális erőssége:

• 20 dBm (100 mW) a kamera és a szülői egység között

• 20 dBm (100 mW) a kamera és az érzékelőlap között

Az Angelcare Monitors Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a babafigyelő készülék teljesíti a 2014/53/EU számú irányelv előírásait. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található:
<https://international.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

VÉDJE A KÖRNYEZETET

Az áthúzott keresek kuka szimbólumok azt jelentik, hogy a helyi törvények és szabályozások szerint a terméket és/vagy az elemét vagy akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladék-gyűjtőbe tenni. Amikor a termék, illetve az eleme vagy akkumulátora elérte az élettartama végét, vigye el egy, a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat és megvédeni az emberek egészségét és a környezetet. Az elemek és akkumulátorok eltávolításához lásd a használati útmutatót.

MŰSZAKI ADATOK

Hatótávolság:
Nyílt terepen (nyílt, akadálymentes területen): akár 250 méter.

Csatornak száma:
Egyesült Államok/Kanada: 24 csatorna.
Európa: 24 csatorna.

Áramellátás:
1 tartozék Li-ion akkumulátor a szülői egység számára
100-240 V AC / 5 V DC adapter a szülői egység számára
100-240 V AC / 5 V DC adapter a kamera számára

1 db 3 V-os CR3032 elem (tartozék) a vezeték nélküli érzékelőlap számára

Vigyázat: Az áramütés veszélyének enyhítése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.

Az elemek nem megfelelő behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn. A szülői egység akkumulátora a felhasználó által cserélhető Li-ion akkumulátor, amelyet az Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd. gyárt. Kizárólag az Angelcare által javasolt csereakkumulátorokat használja. A csereakkumulátorokkal és -elemekkel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az Angelcare ügyfélszolgálatával a www.angelcarebaby.com címen, illetve a helyi forgalmazóknál. A csereakkumulátorok és -elemek mellett megtalálja a használati útmutatóját. Az akkumulátorokat és elemeket tartsa távol a gyermekektől.





Kiadás dátuma: 2018. január 29.

Eszköz(ök): az alább felsorolt típusszámú Angelcare készülékek

Leírás: az alábbi készüléklistában leírt babaőrző készülékek

Gyártó: Angelcare Monitors Inc.
201 boul. De L'industrie Local 104
Canidac, QC J5R 6A6, Kanada

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az itt felsorolt termékek megfelelnek a vonatkozó harmonizált uniós jogszabály alapvető követelményeinek:

a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 2014/53/EU irányelv (RED).

Felhasznált harmonizált szabványok:

3.1(a) cikk – Egészség és biztonság

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 50566:2013

EN 62311:2008

3.1(b) cikk – Elektromágneses összeférhetőség

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 vázlat

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 vázlat

3.2(b) cikk – Rádióberendezések

ETSI EN 300 328 V2.1.1

Eszközök listája –

AC417 típusú légzésfigyelő készülék 4,3 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel és vezeték nélküli érzékelőlappal

AC310 típusú videós babaőrző készülék 4,3 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel

AC315 típusú légzésfigyelő készülék 4,3 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel és vezeték nélküli érzékelőlappal

AC510 típusú videós babaőrző készülék 5 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel

AC517 típusú légzésfigyelő készülék 5 hüvelykes érintőképernyős kijelzővel és vezeték nélküli érzékelőlappal

Hivatalos aláírás:

Roxanne Popoviciu, VP Marketing Europe Angelcare Monitors Inc.





TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy az Angelcare® termékét választotta. Az Angelcare® a termékek fejlesztése és gyártása során a legnagyobb gondossággal jár el, valamennyi termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A cég termékeire 12 hónap garanciát vállal, mely a vásárlás napjától számítva él. A vásárlás napján kapott számlát, vagy fizetési blokkot és/vagy a készülék bélyegzett jótállási jegyét okvetlenül őrizze meg, mert jótállási igényét ezekkel érvényesítheti. A jótállás időtartama alatt minden olyan hiba esetén, amelynek eredete gyártási hibára vagy anyaghibára vezethető vissza, a termék hibás főegységét cseréljük. A készülékek utólagos javítását a gyártó a készülék jellege miatt nem engedélyezi.

A csere időtartama a bejelentéstől (a termék beérkezésétől) számított kb. 8nap. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan termékre, amely javítási kísérlet, fizikai behatás, rossz feszültség, helytelen alkalmazás, vagy használat, ill. nem megfelelő elemek használata miatt sérült meg. A garancia szintén nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos javíttatta a készüléket, vagy átalakította.

Meghibásodás esetén a termék főegységeinek cseréjét 3 munkanapon belül az eladó szerv, ezt meghaladóan a forgalmazó végzi, kérjük utóbbi esetben ezt okvetlenül jelezze a megadott elérhetőségeken. (info@angelcare.hu) Importőr és szerviz: Isd. Forgalmazók / Distributors: Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. § alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.
10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.





12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát/blokkot és/vagy lebélyegzett, kitöltött jótállási jegyét feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.

13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben::

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékkért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre, vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikkben végzett bármilyen beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy az ANGELCARE® AC417-517 típusú készülékek a CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabvány-előírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

| | |
|---|---|
| TERMÉK TÍPUSA: ANGELCARE® AC417-517 típusú készülék | A TERMÉK GYÁRTÁSI SOROZATKÓDJÁ: |
| VÁSÁRLÁS DÁTUMA: | ELADÓ SZERV BÉLYEGZŐJE, ALÁÍRÁS: |

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK CSECSEMŐKORI LÉGZÉSKIMARADÁS ESETÉN

Amennyiben a légzésfigyelő megszólal, azonnal ellenőrizze, hogy a riasztás valós-e. Téves riasztás esetén derítse fel ennek okát, változtasson a gyermek kiságykörülményein, vagy fokozza a készülék érzékenységét.

Riasztás esetén a következő életfunkciókat azonnal ellenőrizze gyermekénél:

- a baba lélegzik-e,
- van-e a csecsemőnek szívverése;
- megfelel-e a gyermek vérkeringése.

A légzés ellenőrzése a legegyszerűbb, a mellkas emelkedő-süllyedő mozgása szabad szemmel is könnyen látható, a gyermek arcához közel hajolva a száj- és orrnyílásnál légző hang (szuszogás) hallható. A csecsemő szívverését az ismert testpontokon lehet pulzustapintással ellenőrizni, nyaki- vagy csukló- verőér esetén. A vérkeringés ellenőrzésének legegyszerűbb módja a baba arcszínének megvizsgálása. Egészséges keringés esetén a gyermek arcbőre rózsaszínű, megfelelő vérkeringés hiánya esetén a szín kékesszürke.

A három funkció mindegyike fontos, de a készülék riasztása a légzőmozgás kimaradását jelzi.

Amennyiben a gyermek nem lélegzik, azonnal hívja a mentőket a 104, vagy 112 telefonszámokon, és a következő ÉLETMENTŐ INTÉZKEDÉSEKET az életfunkciók ismételt beindulásáig, vagy a mentők kiérkezéséig a leírtak szerint végezze.





| Ha a gyerek ... | Megfelelő SÜRGŐS intézkedések |
|-------------------------|--|
| ...eszméletlen | Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, kb. 40-szer percenként. Ne alkalmazzon szívmasszázst! Folytassuk a lélegeztetést addig, amíg a gyermek újra magától lélegzik, vagy amíg a mentők át nem veszik. |
| ...nem lélegzik | |
| ...van pulzusa | |
| ...eszméletlen | Kicsit döntse hátra a baba fejét és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést, 3 lélegeztetéssel Utána alkalmazzon 15 szívmasszázst, majd ismét 3 lélegeztetést. Csak akkor hagyja abba az intézkedéseket, ha a gyermek ismét maga lélegzik. |
| ...nem lélegzik | |
| ...nincs pulzusa | |

MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS

1. Kicsit döntse hátra a baba fejét. Tegye az egyik kezét a baba homlokára, másik kezének két ujját az álla alá. Így döntse hátra a baba fejét. (a. kép) Ha lélegeztetéskor nem emelkedik a baba mellkasa, akkor azonnal ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban van-e a baba feje. A leggyakoribb hiba a mesterséges lélegeztetéskor a nem megfelelő feje pozíció.



2. Száj és orr körülzárása

Tegye a száját a csecsemő orrára és szájára olyan szorosan, amennyire tudja. (b. kép)



3. Három levegő befúvás

Annyi levegőt fújjon a csecsemőnek, amennyit Ön egy könnyed levegővétellel a szájában tud tartani. A csecsemő mellkasa megemelkedik, amikor befújja a levegőt, és lesüllyed kilélegzésnél. Egy befúvás kb. 1-1,5 másodpercig tart. A befúvások között a csecsemő orrát és száját szabadon kell hagyni, így önállóan bekövetkezik a kilégzés. A befúvás után fordítsuk fejünket oldalra úgy, hogy a gyermek légzésmozgását figyelhessük. (c. kép)





Ha nem emelkedik a baba mellkasa, akkor ez abból is következhet, hogy valami elzárja a baba légcsovét. Szüntesse meg az akadályt, fordítsa oldalra a baba fejét és a kisebbik ujjával törölje ki a baba száját, majd fordítsa vissza a gyerek fejét az előző pozícióba és folytassa a lélegeztetést. (d.kép)



SZÍVMASSZÁZS

1. Feltételek

Ahhoz, hogy szívmasszázszt végezhesen, szilárd felületre van szükség. Egy asztal, vagy pelenkázó megfelel erre a célra, de ha nincs a közelben akkor a padló is alkalmas lehet. Nem szabad szívmasszázszt matracon végezni, mert az utórugózást eredményez. A következő lépésekhez, hogy a helyes nyomási pontot megtaláljuk, a gyermek felsőtestét szabaddá kell tenni.

2. Nyomási pont

Képzelsen el egy összekötő vonalat a csecsemő két mellbimbója között. Jobb keze mutatóujját helyezze e vonal alá, és szorosan mellé a középső és gyűrűsujját. (a.kép) Emelje fel a mutatóujját és így a gyűrűs- és középső ujjával meg tudja nyomni a baba mellkasát. A gyűrűs- és középső ujjá így 0,5-1 cm-rel a mellbimbókat összekötő vonal alatt vannak



3. 15 szívmasszázs

A mellkas csont nyomásával nyomást gyakorol a szívre is, amellyel egy szükségvérkeringést indít be, és ezzel eljut az oxigén a létfontosságú szervekhez. Ahhoz, hogy a szív az összenyomás után újra megtelhesen vérell, figyelni kell arra, hogy a mellkas csont ismét tehermentesítve legyen. Ekkor az ujjat nem kell a mellkasról felemelni, mert elmozdulhat a helyes nyomási pontról. A nyomási mélység a mellkas-keresztmetszet egyharmada kell hogy legyen, ez csecsemők esetében kb. 2 cm. Ahhoz, hogy a szívmasszázs a normál szívizom összehúzódásának megfelelően, nem kell hirtelen nyomással végezni a szívmasszázszt, hanem finoman úgy, hogy a szív nyomása annyi ideig tartson, mint a szívizom elernyedése. (b. kép)



www.angelcarebaby.com



IMA17517-HU-16012018

